

Sjekkliste ved uteblitt fallvarsel

Sjekkpunkt	OK?
Fallalarmen er aktiv. Kontroller innstillingene og at ingen har endret dem for tidspunktet da fallet skjedde.	
Personen falt i et område der sensoren kan registrere en hendelse.	
Test alarmen. Legg deg på samme sted som personen lå da det ikke ble generert noe alarm. Blir det utløst en fallalarm?	
Gulvet er oransje i den anonymiserte visningen der personen falt. Det finnes ingen gråsoner eller blindsoner der fallet skjedde.	
Det er ingen møbelmarkering (seng, sofa eller lenestol) i rommarkeringsverktøyet der personen falt.	
Ingen har markert rommet på nytt etter hendelsen.	
Sensoren er riktig vinklet og har fornuftige verdier i rommarkeringsverktøyet.	
Personen falt ikke ned i sittende stilling under fallet.	
Personen hadde ikke knær eller armer oppreist under fallet.	
Kontroller følsomhetsnivået for alarmen. Høy følsomhet, nivå 4 (alarmen utløses lettere), genererer en fallalarm ved en høyere centimeterhøyde enn de andre nivåene. Prøv om høyere følsomhet utløser alarm der personen falt i rommet.	
Ingen i personalet var nærværende (nærværsmarkert) ved hendelsen. (Noen virksomheter velger å la fallalarm gå gjennom ved nærværsmarkering, andre ikke.)	
Kontroller alarmloggen. Samme sensor har ikke generert en alarm innen 60 sekunder etter det uteblitte fallet.	
Kontroller alarmloggen. Har alarmen blitt generert, men ikke mottatt av personalet?	
Kontroller alarmloggene. Har alarmen blitt mottatt og kvittert ut av personalet?	
Har du ikke funnet en forklaring på hvorfor fallalarmen uteble?	
Ring support, og ha sjekklisten lett tilgjengelig.	