



5 enkla steg

för att vinkla RoomMate



1

UNVIK TAK, VÄGGAR OCH FÖNSTER

Justera sensorn så att den inte ser mot taket, väggar eller fönster. Det minskar reflektioner, störningar och förbättrar således sensorns förståelse av rummet.

2

JUSTERA SENSORN I HÖJDLED


I de flesta fall uppfattar sensorn rummet bäst när den vinklas så att den ser precis under dörrkarmar i rummet. Tänk på att en för högt eller för lågt vinklad sensor ökar risken för feltolkning av rummet och leder till missvisande larm.



3

BESTÄM FOKUS

Sensorn är placerad utifrån rummets förutsättningar och ska inte flyttas, men utifrån behovet kan sensorn behöva vinklas. Vanligen är sängen det största fokusområdet. Se till att sängen är tydligt synlig i sensorns synfält för optimal funktion av sänglarm. Finnas ett annat behov, rikta då sensor utefter detta. Tips: om sensorn kan vinklas så att den ser hela rummet och samtidigt uppfatta rummet på rätt sätt, är det att föredra.

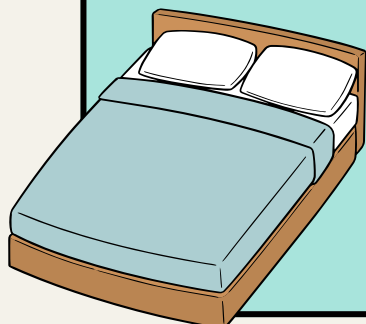

4

KONTROLLERA DEN ANONYMISERADE VYN

Säkerställ att golvet i den anonymiserade vyn är orange.


Upptäcks en gråzon:

- Kontrollera vad som stör sensorn, t.ex. möbler, lampor eller mörk fallmatta. Om möjligt möblera om eller överväg att justera vinklingen.

Upptäcks en blindzon:

- Försök åtgärda blindzonen genom att möblera om. Går det inte att åtgärda rekommenderas användning av flera larmkombinationer för att uppmärksamma riskfyllda situationer.

Vid svårigheter: Kontakta Sensio Support

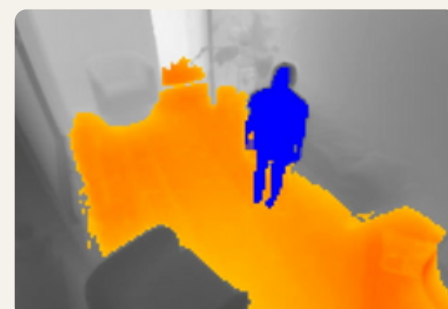

5

KONTROLLERA VÄRDEN I RUMSMARKERINGSVERKTYGET

Använd rumsmarkningsverktyget för att kontrollera att y-värden och z-värden är rimliga där möbler eller dörrar ska ritas in. Detta säkerställer att sensorn har uppfattat rummet rätt.

