

Brukerveiledning

Sensio Velferdsportal

Hub for passiv varsling for løse sensorer



Innhold

- **Generelle veiledninger**

- Legg til bruker fra EPJ
- Legg til boenhet manuelt
- Tilknytte ansattgrupper
- Innstillinger for tilstedemarkering/besøk


- **Hub for passiv varsling for løse sensorer**

- Legg til hub for passiv varsling
- Legg til løse sensorer – generell
- Konfigurer hendelsesinnstillinger for løse sensorer
- Legg til bevegelsessensor
- Legg til vandresensor
- Legg til dørkontakt

Generelle veiledninger



Hovedmeny

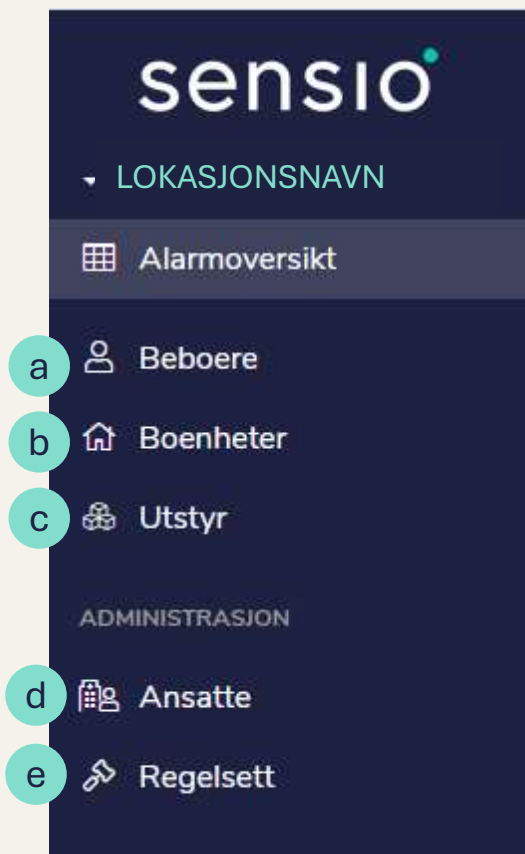

a Legge til beboer

b Legge til utstyr på boenhet, aktivere hendelser (fall, digitalt tilsyn ++)


c Legge til enheter og få oversikt over alt av utstyr

d Legge til ansatte, tildele ansattgrupper,

e Se oppsett for alarmruting


Opprett boenhet og beboer 1/3

1. Logg inn i Velferdsportalen
2. Gå til menyen «Beboere»
3. Klikk «+Ny beboer» (i høyre hjørne)
4. Skriv inn fødselsnummer til brukeren (NB! Kontroller at det er krysset av for «Hent fra EPJ»)

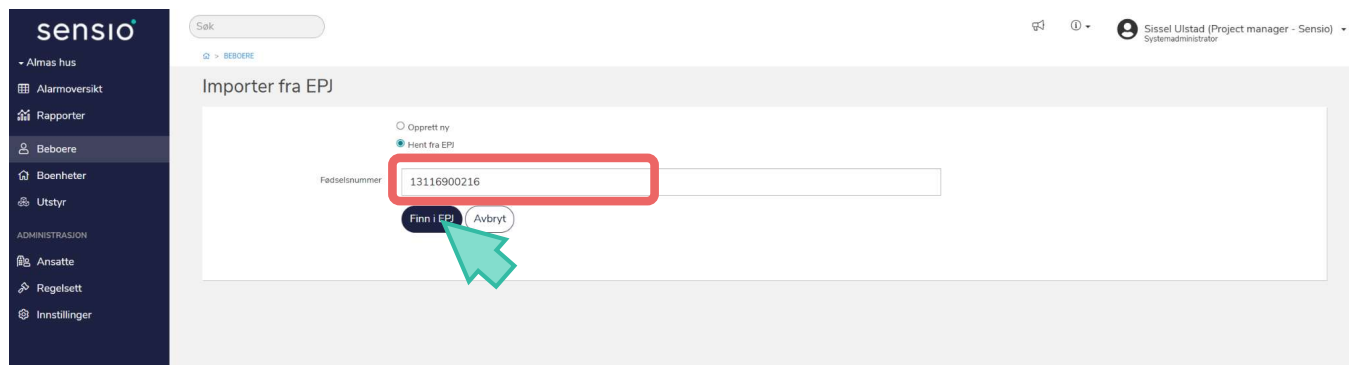

Sensio logo and navigation menu on the left. The main content area is titled 'Importer fra EPJ'. It features two radio buttons: 'Opprett ny' (unselected) and 'Hent fra EPJ' (selected). Below these is a text input field for 'Fødselsnummer' containing the value '13116900216'. At the bottom of the form are two buttons: 'Finn i EPJ' and 'Avbryt'. A green arrow points to the 'Finn i EPJ' button.

5. Gitt at brukeren finnes i EPJ vil personalia og informasjon komme opp automatisk. Kontroller at navn og adresse er riktig og trykk «Lagre og legg til boenhet»

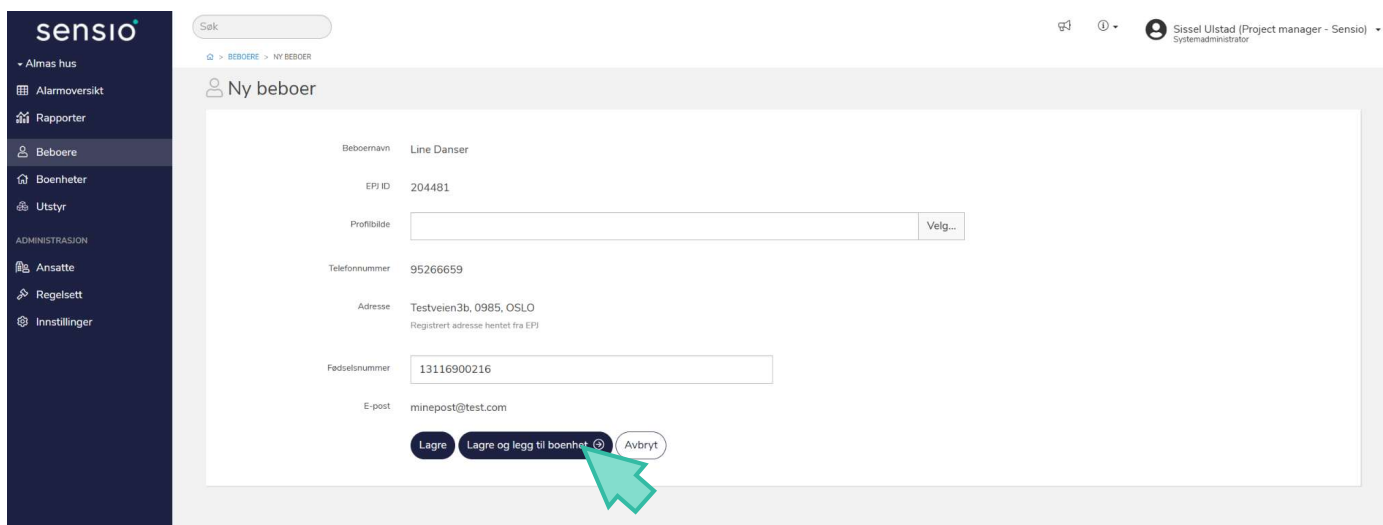

Sensio logo and navigation menu on the left. The main content area is titled 'Ny beboer'. It contains a form with the following fields: 'Beboer navn' (Line Danser), 'EPI ID' (204481), 'Profilbilde' (with a 'Velg...' button), 'Telefonnummer' (95266659), 'Adresse' (Testveien 3b, 0985, OSLO, with a note 'Registrert adresse hentet fra EPJ'), 'Fødselsnummer' (13116900216), and 'E-post' (minepost@test.com). At the bottom are three buttons: 'Lagre', 'Lagre og legg til boenhet' (highlighted with a green arrow), and 'Avbryt'.

Opprett boenhet og beboer 2/3

6. Gitt at brukeren er registrert med en adresse vil du få valget om å opprette ny boenhet. Trykk «Opprett ny boenhet»

The screenshot shows a web application interface for Sensio. A modal dialog titled "Legg til boenhet" (Add housing unit) is displayed in the center. The dialog contains the text: "Vil du opprette en ny boenhet med adresse **Testveien3b, 0985, Oslo**, eller flytte **Line Danser** inn på en tidligere registrert boenhet?" (Do you want to create a new housing unit with address **Testveien3b, 0985, Oslo**, or move **Line Danser** into an already registered housing unit?). Below this text are two buttons: "Opprett ny boenhet" (Create new housing unit) and "Flytt inn på tidligere registrert boenhet" (Move into already registered housing unit). The "Opprett ny boenhet" button is highlighted with a red rectangle and a green mouse cursor. The background shows a user profile form with the following details: Beboer navn: Line Danser, EPJ ID: 204481, Profilbilde: (empty field with a "Velg..." button), Telefonnummer: 95266659, Adresse: Testveien3b, 0985, OSLO (with a note "Registrert adresse hentet fra EPJ"), Fødselsnummer: 13116900216, and E-post: minepost@test.com. At the bottom of the form are three buttons: "Lagre", "Lagre og legg til boenhet" (with a plus icon), and "Avbryt".

Opprett boenhet og beboer 3/3

7. Endre til riktig informasjon:

- Boenhet: Ligger standard som beboerrom, så denne må endres til riktig benevning (hus eller leilighet)
- Plassering: Bruk nedtrekksmenyen og velg riktig sone

8. Trykk «Lagre»

🏠 > LINE DANSER > LEGG TIL BOENHET

🏠 Legg til boenhet

Boenhet *	Hus
Plassering	📍 Aker sykehus, bygg 22
Adresse	Testveien3b
Postkode	0985
Poststed	OSLO
Tilleggsinformasjon	
Aktiver to-veis tale	☐

Lagre

Avbryt



Hva gjør jeg dersom brukeren ikke har registrert adresse?

Boenheter kan også legges til manuelt dersom brukeren ikke er registrert med en adresse i EPJ.

1. Logg inn i Velferdsportalen
2. Gå til menyen «Boenheter»
3. Klikk «+Ny boenhet» (i høyre hjørne)
4. Fyll inn riktig informasjon
 - a) Boenhet: Hus
 - b) Plassering: Bruk nedtrekksmenyen og velg riktig sone
 - c) Adresse: Fyll inn riktig adresse, postkode og poststed
 - d) Dersom det skal benyttes to-veis tale via RoomMate må den nederste boksen krysses av.
5. Klikk «Lagre»

🏠 > BOENHETER > NY BOENHET

Ny boenhet

Boenhet *

Plassering

Adresse

Postkode


Poststed

Tilleggsinformasjon


Aktiver to-veis tale ☒

Hva gjør jeg dersom brukeren ikke har registrert adresse?

- Når boenheten er opprettet så kan den tilknyttes en bruker. Klikk på «Legg til» under beboer og velg «Eksisterende beboer» (gitt at du har lagt til brukeren først).

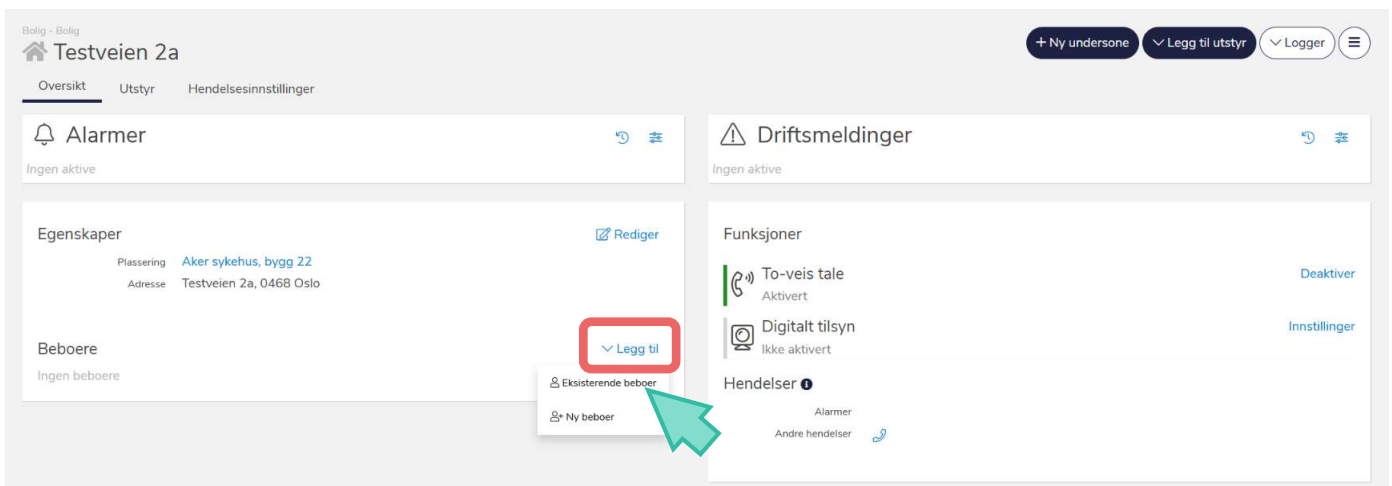

- Finn bruker fra nedtrekkslisten og trykk «Lagre»

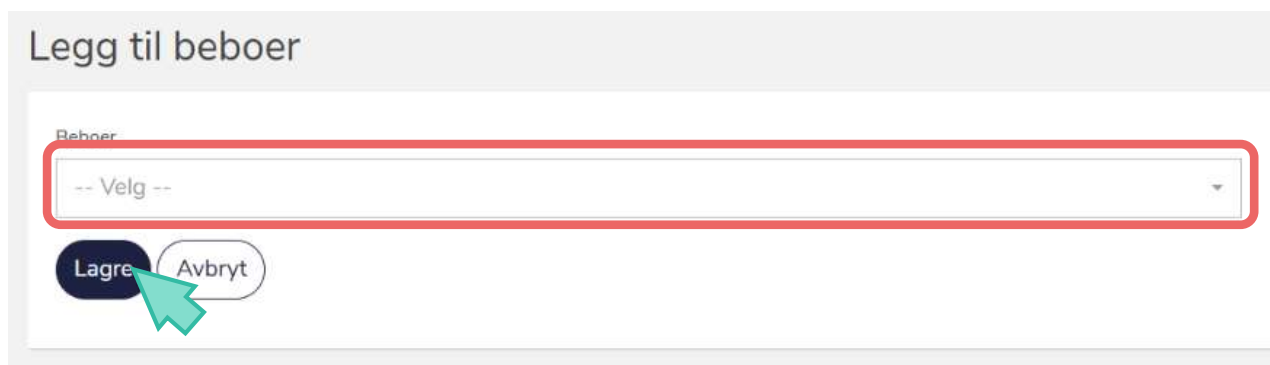

Tilknytte ansattgrupper

Ansatte kommer inn automatisk via synkronisering med AD (Entra-ID). Det kjøres synkronisering hver natt. Dersom du ikke finner en ansatt kan det hende at denne er lagt til etter synkronisering, da kan du:


1. Gå til ansattmenyen i Velfersportalen
2. Trykk på de tre strekene i øverste høyre hjørne og velg «Synkronisering med AD»



3. Dersom du fortsatt ikke finner den ansatte tyder det på at ansatt ikke er registrert i riktig AD-gruppe. Ta kontakt med din nærmeste leder.
4. Når den ansatte ligger inne i Velferdsportalen må det tildeles riktig ansattgruppe, se neste side.

Tilknytte ansattgrupper


1. Fra menyen 'Ansatte', velg fanen 'Ansattgrupper'

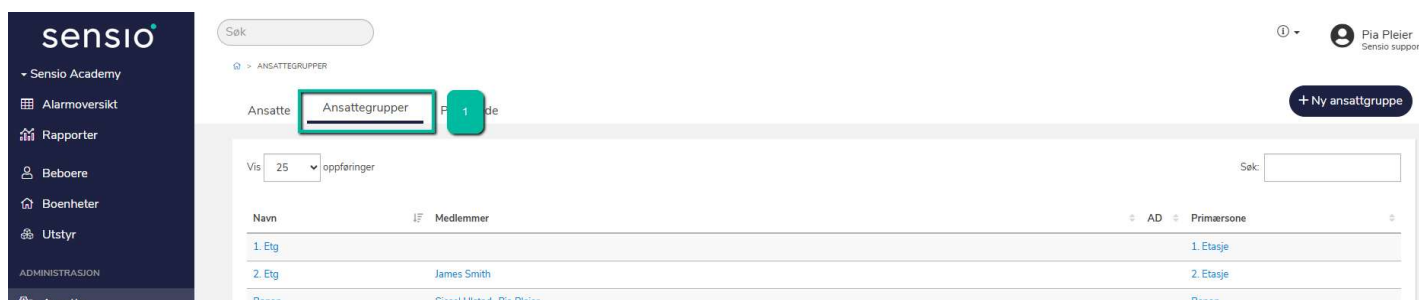


2. Velg riktig ansattgruppe ved å trykke på navnet til gruppen.



3. Trykk på «+ Legg til» ved siden av medlemmer

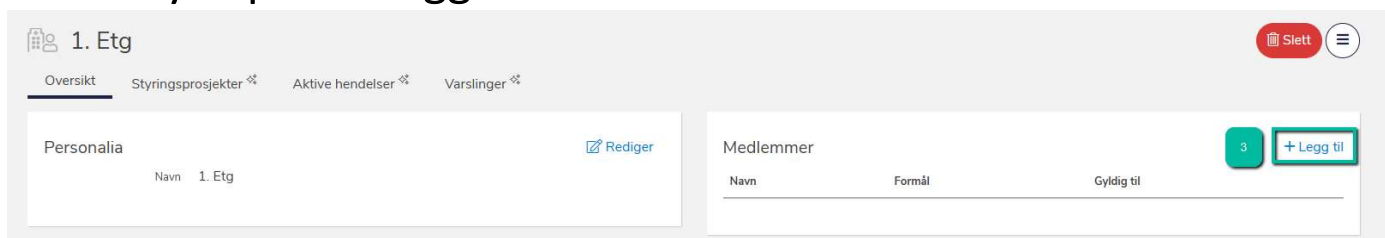

4. Søk opp relevante ansatte eller velg fra listen. Her kan du velge flere ansatte samtidig. Velg formål, f.eks. «Yte helsehjelp»

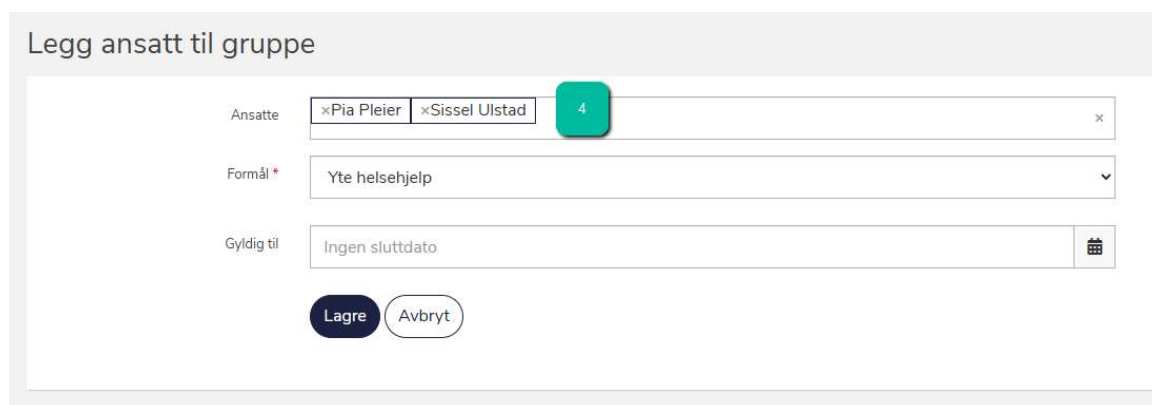

5. Trykk Lagre.

6. Gjenta steg 2 – 4 på alle ansattgrupper.

Hva skjer hvis ingen ansatte er pålogget riktig gruppe/sone i Sensio Pocket?

Hvis det går en alarm på en sone hvor ingen er pålogget, er det satt opp en **backup-løsning som vil fange opp dette og alarmere via sms.**

Dette fungerer slik at hvis ingen er pålogget ansattgruppen (sonen) som skal motta alarmen til definert tidspunkt og det blir trigget en ny alarm, så vil det sendes en sms til definert vakttelefon med informasjon om type varsel, slik at de kan logge inn i Pocket og håndtere alarmen.

Hvis noen er pålogget sonen og alarmen ikke er håndtert etter 60 min, så vil det også bli sendt en sms til definert vakttelefon som eskalering.



Tilstedeværelseinnstillinger

I **Velferdsportalen** kan du skreddersy varsling- og tilstedeværelsesinnstillinger for hele lokasjonen, soner eller spesifikke boenheter.

Sett standardinnstillinger for hele lokasjonen (2a)

Bestem hvor lenge en tilstedemarkering kan være aktiv før et varsel sendes eller tilstanden automatisk fjernes. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Aldri** (ingen varsling)
- **En tidsperiode mellom 15 minutter og 8 timer**

For å konfigurere dette:

1. Gå til **Innstillinger (1)** i hovedmenyen.
2. Naviger til fanen **Tilstedeværelsesinnstillinger (2)**.

Det er to hovedfunksjoner:

- **Varsling for lang tilstedeværelse** – Markerer rom der noen har vært til stede over en gitt tid, med varsling i Sensio Pocket og Alarmtavle. Varselet gir ansatte mulighet til å vurdere situasjonen og deaktivere markeringen ved behov.
- **Automatisk avstilling av tilstedeværelse** – Fjerner markeringen automatisk, slik at ansatte ikke trenger å gjøre det manuelt. Dette fungerer som en sikkerhetsmekanisme for å forhindre feil. Denne funksjonen skiller på ansattes tilstedemarkeringer og besøk, så de kan settes individuelt.


Brukere kan også tilpasse **lyden for varsler** og spille den av direkte i Velferdsportalen.

Tilpass varsling for spesifikke avdelinger eller boenheter (2b)

For områder med ulike behov kan du overstyre standardinnstillingene og definere egne grenser. For eksempel:

- **Standard for hele lokasjonen:** Varsel etter **30 minutter**.
- **Unntak for en boenhet:** Hvis en tjenestemottaker ofte har lange besøk, kan du sette grensen til **2 timer**.

Husk å **Lagre endringer (3)** når du er ferdig

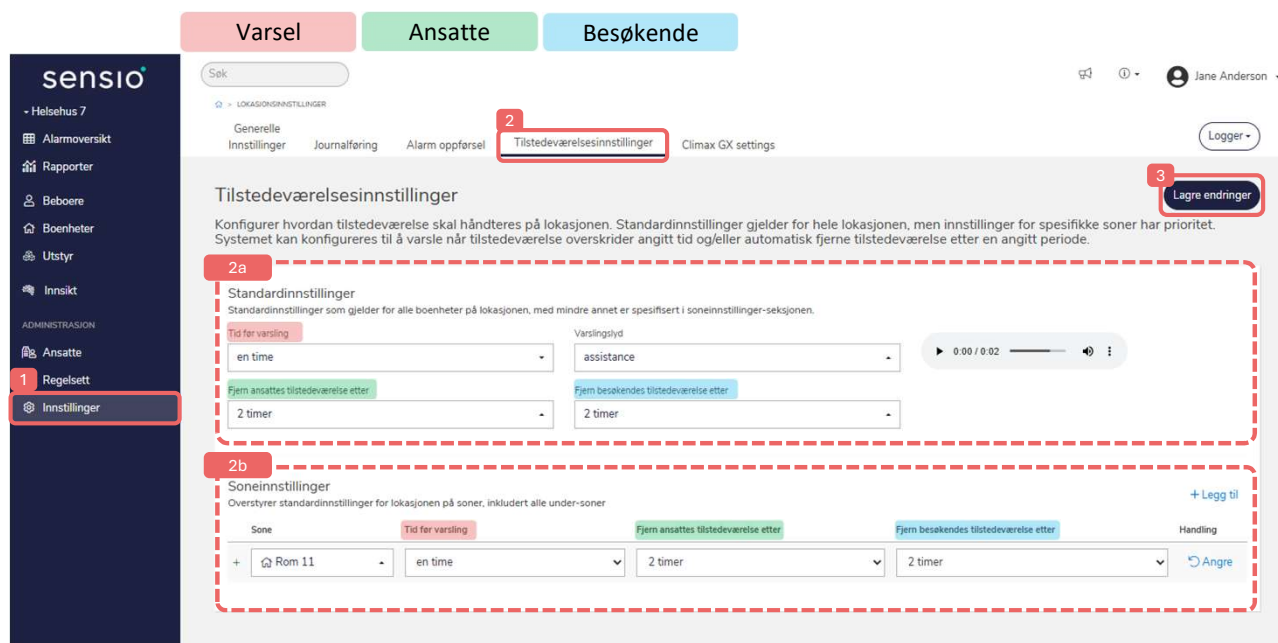


Hub for passive varslinger




Legg til hub for passiv varsling

1. Gå til boenhetens informasjonssiden
2. Trykk på «+Utstyr»
3. Velg deretter «Gateway»
4. Legg inn mac-adressen, denne finner du på baksiden av enheten (xx:xx:xx:xx:xx) – Husk å ta med kolon :
5. Fyll inn telefonnummer til Hub. NB! Dette må være riktig første gang siden det ikke kan endres i ettertid.
6. Trykk «Legg til».
7. Du er nå tilbake til boenhet-siden og vil se en melding om vellykket lagring.

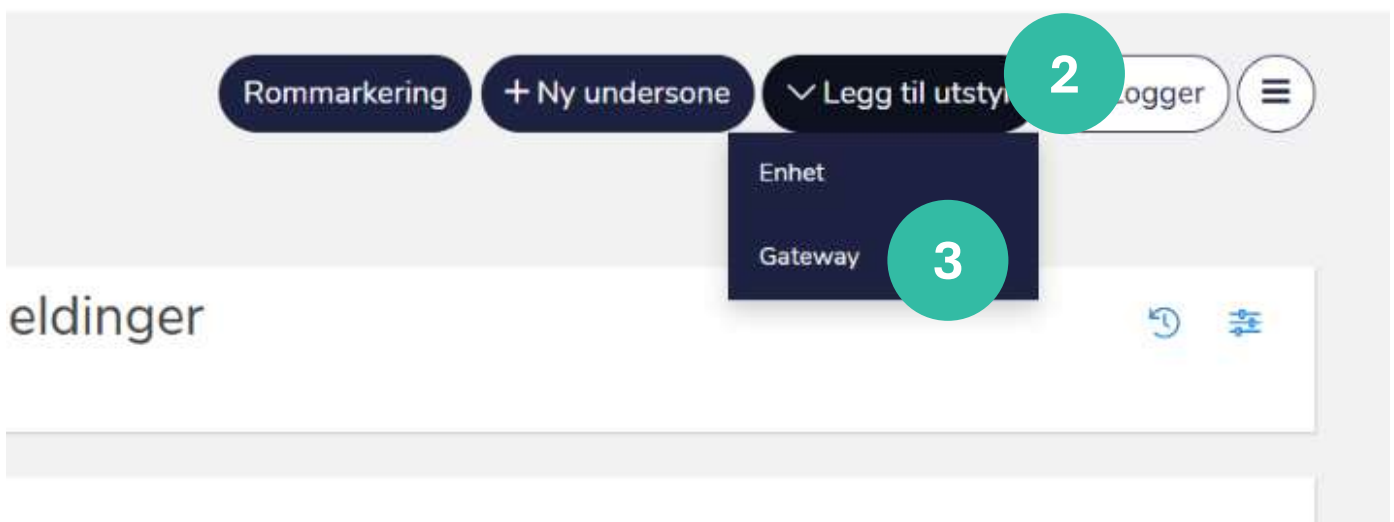


Legg til løse sensorer - generell

1. Fra boenhetens informasjonssiden, gå til fanen utstyr

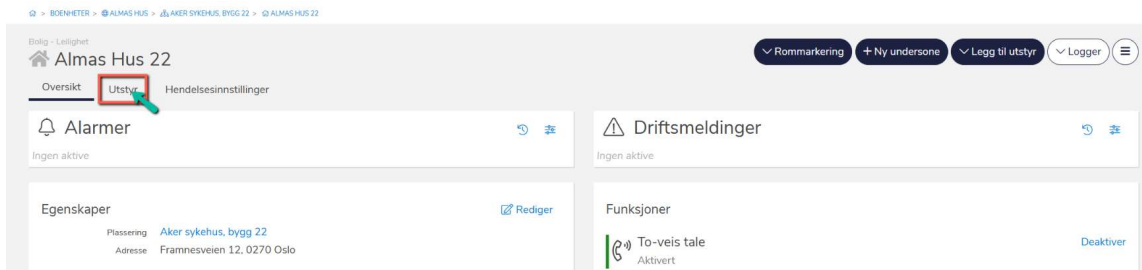

2. Trykk på plusstegnet ved siden av gatewayen (NB! Hvis siden er zoomet inn kan det hende du må scrolle mot høyre for å se pluss-tegnet)

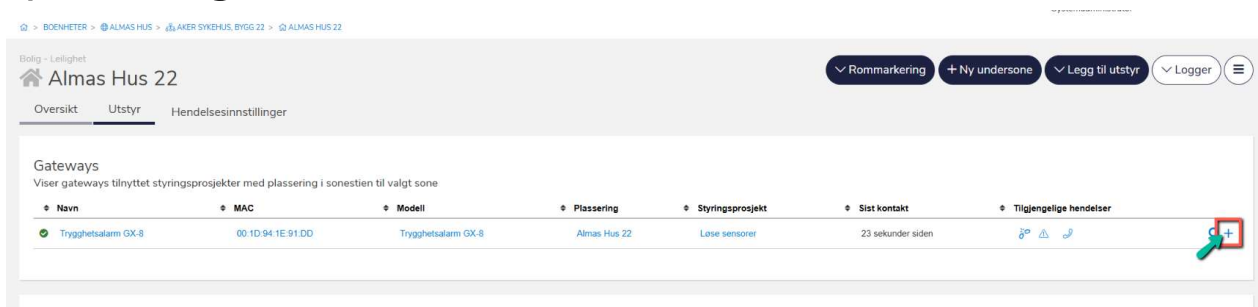

3. Fyll inn informasjon

- Type: Velg type enhet du ønsker å koble til. Se neste side for informasjon om sensorene og hvilke type du skal velge i Velferdsportalen.
- Plassering: Kontroller at du er på riktig boenhet
- Styringsprosjekt: La stå
- Enhetsnavn: Lag navn ut fra **type enhet-boenhetsnavn** (f.eks. PIR-**<Navn på bonhet>**). Se anbefalt navngivning på neste side.
- RF-kode: skriv inn nummer som du finner på esken (10 siffer, ved QR-kode)
- Hendelse: Velg hvilken type alarm som skal bli utløst (dette vil vises som et ikon og navn på alarm)

4. Trykk «Lagre»

5. Gjenta steg 2 – 4 på alle sensorer du ønsker å legge til.

Legg til løse sensorer - generell

Informasjon om tilgjengelige løse sensorer

Navn	Type i velferdsportalen	Anbefalt navngivning
Vandrealarm	Dørsensor med retningsangivelse	Vandrealarm-<Leil.navn>
PIR (bevegelsessensor)	Bevegelsesdetektor	Bevegelsesdetektor-Plassering-<Leil.navn>
Magnetkontakt (dørkontakt)	Dørsensor	Dørsensor-<Leil.navn>

Konfigurer hendelsesinnstillinger for løse sensorer

På alle løse sensorer kan du sette innstilling på når varslingen skal være aktiv (tidsrom) og eventuelle forsinkelser)

1. Gå til fanen «Hendelsesinnstillinger» fra boenhet-siden
2. Trykk på de ulike varslingene du valgte når du la til trådløst utstyr. Du kan se hvilke hendelser som er tilknyttet en trådløs sensor ved å se på navnet på utstyret helt til høyre.

Oversikt Utstyr <u>Hendelsesinnstillinger</u>			
#	Navn	Innstillinger	
1	Inaktivitet	Ikke i bruk	Test1 Trygghetsalarm GX-8
2	Ut av seng	I bruk innenfor definerte perioder	Test1 PIR - Test 1

3. Her kan du sette innstillinger for de ulike varslingene (f.eks. tidsforsinkelser)

Ut av seng

Logger

Simuler

Innstillinger

Logg

Varslinger

Alarmen utløses dersom beboer går ut av seng og ikke kommer tilbake innen angitt tidsforsinkelse. Bevegelse ut av seng detekteres med en bevegelsessensor ved seng. Alarmen kan settes opp til å varsle i gitt tidsrom.

I bruk

Tidsrom 1

00:00

23:59

Tidsforsinkelse

0

minutt(er)

Lagre

Avbryt

Bevegelsessensor

Bevegelsessensor

Beskrivelse

En batteridrevet og trådløs passiv infrarød sensor som detekterer bevegelse.

Det er kun en knapp på produktet og dette er knappen for innlæring/signalstyrketest.

For å spare batteri er det en strømsparingsperiode på 1 minutt etter hver deteksjon. Den vil ikke kunne detektere ny bevegelse før 1 minutt har gått.



Bevegelsessensor

Montering - generelt

Sensoren er laget for å monteres **på flat overflate på vegg eller i tak** og kan monteres stående eller liggende. Sensoren skrues fast på ønsket flate gjennom forberedt gjennomføring i bakre plastvegg eller ved bruk av dobbeltsidig tape (medfølger ikke).

Fjern plastbit for å **gi sensoren kontakt med batteriet** og meld sensoren inn til samvirkende hub.

- **Signalkonflikter:** Ikke monter PIR slik at den peker direkte mot en dør med magnetkontakt. Hvis begge aktiveres samtidig ved inngang, kan radiosignalene forstyrre hverandre og føre til manglende varsling.
- **Temperaturendringer:** Unngå installasjon i områder med rask temperaturendring, som nær klimaanlegg, varmeovner eller ventiler.
- **Store hindringer:** Unngå å montere PIR slik at store gjenstander blokkerer deteksjonsområdet.
- **Varmekilder:** Ikke rett detektoren direkte mot peis, ovner, varmtvannsberedere eller andre kilder til varme.
- **Bevegelige objekter:** Unngå områder med bevegelige elementer, som gardiner eller hengende dekorasjoner, i synsfeltet.
- **Direkte sollys:** Unngå plassering der detektoren er direkte eksponert for sollys.
- **Fri sikt:** Sørg for at synsfeltet ikke er blokkert av gardiner, møbler, dekorasjoner eller andre objekter.
- **Bevegelsesretning:** Plasser detektoren slik at en eventuell inntrenger beveger seg på tvers av synsfeltet (side-til-side) for best mulig deteksjon.

Bevegelsessensor

Montering – vertikalt (stående)

Deteksjonsområde: inntil 10-12 meter innenfor en vinkel på 110° (lengde) og 10° (bredde)

Monteringshøyde:

Det anbefales å montere PIR-detektoren i en høyde mellom 1,9 og 2,0 meter for optimal deteksjon. Med optimal deteksjon menes her at sensoren får størst mulig rekkevidde. Hvor dette ikke er hensiktsmessig kan også sensor plasseres lavere.


Eksempel: Du ønsker å få varsel om at en person har kommet inn i rommet. Da burde den monteres 1,9-2 meter over bakken.

Eksempel: Du ønsker å få varsel om at noen har forlatt seng. Da burde den plasseres rett under sengehøyde, for å ikke plukke opp bevegelse fra selve sengen

VIKTIG:

Husk at det finnes en blind sone rett under detektoren. Denne blindsonen blir større jo høyere detektoren monteres.

Ytelsen kan påvirkes av eksterne faktorer, som høyden på objektet som skal oppdages, ønsket dekningsområde og forholdene i området der detektoren installeres. Justeringer i høyde og plassering kan være nødvendig etter faktisk miljø.

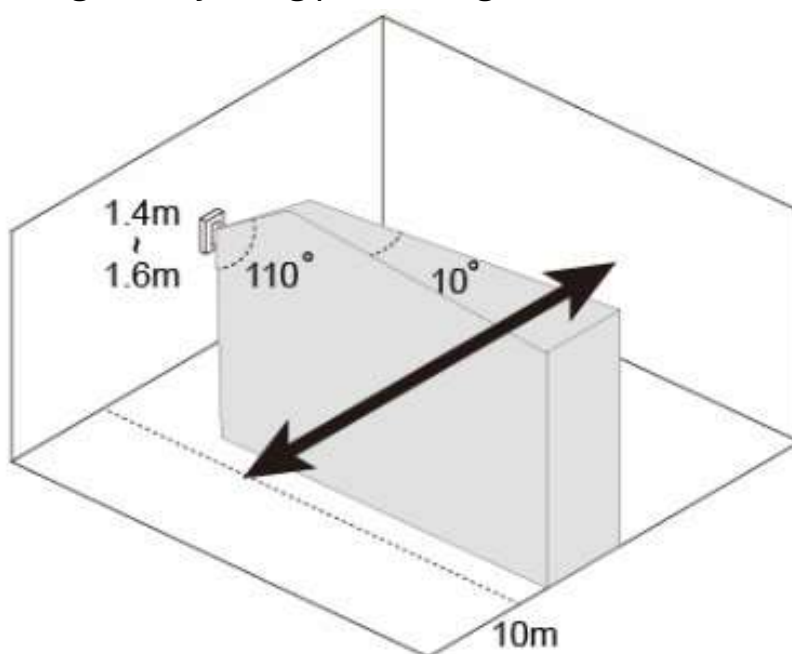

Bevegelsessensor

Montering – horisontal (liggende)

Deteksjonsområde: inntil 5 meter innenfor en vinkel på 110° (bredde) og 10° (lengde)


Monteringshøyde:

Ved horisontal plassering vil man dekke et større horisontalt område. Men lengden sensoren rekker vil være redusert sammenlignet med vertikal plassering.

VIKTIG:

Husk at det finnes en blind sone rett under detektoren. Denne blindsonen blir større jo høyere detektoren monteres.

Ytelsen kan påvirkes av eksterne faktorer, som høyden på objektet som skal oppdages, ønsket dekningsområde og forholdene i området der detektoren installeres. Justeringer i høyde og plassering kan være nødvendig etter faktisk miljø.

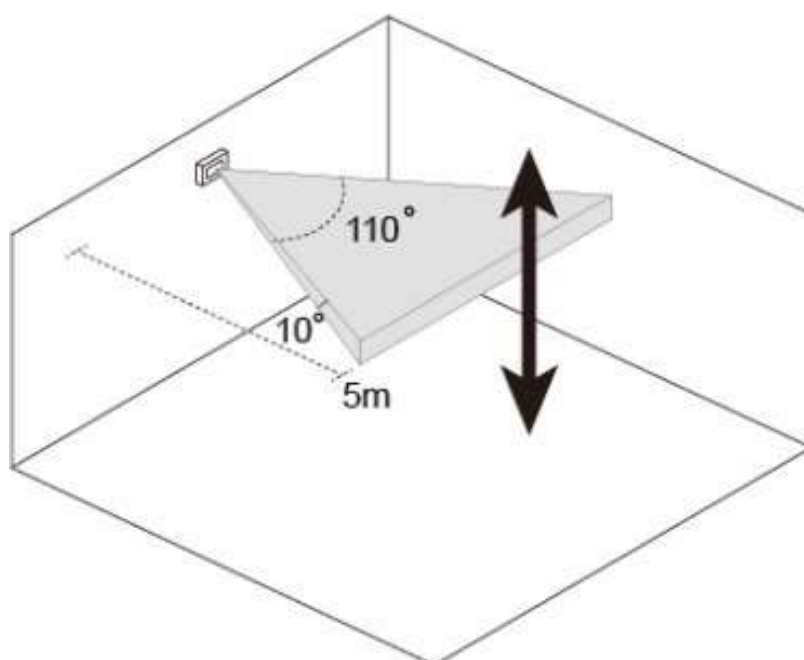

Legg til bevegelsessensor i Velferdsportalen

1. Fra boenhetens informasjonssiden, gå til fanen utstyr
2. Trykk på plusstegnet ved siden av gatewayen (NB! Hvis siden er zoomet inn kan det hende du må scrolle mot høyre for å se pluss-tegnet)
3. Fyll inn informasjon
 - a) Type: Bevegelsesdetektor
 - b) Plassering: Kontroller at du er på riktig boenhet
 - c) Styringsprosjekt: La stå
 - d) Enhetsnavn: Bevegelsesdetektor-**plassering-**
adresse
 - e) RF-kode: skriv inn nummer som du finner på esken (ved QR-kode)
 - f) Hendelse: «Ut av seng»
 - g) Lagre

Legg til enhet

Det er kontakt med Trygghetsalarm GX-8 gatewayen som enheten skal kobles til er. Konfigurasjon er mulig.

Type *	Bevegelsesdetektor (ClimaxGx8)	
Plassering	Almas Hus 22	
Styringsprosjekt	Løse sensorer (Climax GX-8)	
Enhetsnavn *	Bevegelsesdetektor-Seng-Almas 22	
Tilleggsinformasjon		
RF-kode *	10 eller 14 tegn. 0-9 og a-f	
Hendelse	Ut av seng	

Lagre
Avbryt

Varslinger fra bevegelsessensor

Bevegelsessensor kan gi to ulike varslinger; «ut av seng» og «ikke i seng». Merk at «ikke i seng» krever to bevegelsessensorer.

Ut av seng

- Varsler dersom bruker går ut av sengen og ikke kommer tilbake til sengen innen en angitt tid.
- Krever 1 stykk bevegelsessensor. Denne bør plasseres ved seng.
- Hendelse som skal velges ved registrering av sensor:
 - «Ut av seng»

Ikke i seng


- Varsler dersom bruker går ut av sengen, samt bevegelse blir detektert et annet sted i boligen.
- Krever minst 2 stykk bevegelsessensorer. Den ene sensoren bør plasseres ved seng og den andre bør plasseres i et annet rom for å detektere at brukeren går utenfor soverommet.
- Dersom man har flere rom hvor man ønsker å detektere bevegelse så kan flere bevegelsessensorer legges inn på samme måte.
- Hendelse som skal velges ved registrering av sensor:
 - Ved seng «Ut av seng»
 - Annet rom «Ikke i seng»

Konfigurer varslingsnavn for bevegelsessensor – ut av seng

1. Fra boenhetens informasjonssiden, gå til utstyrsfanen på toppen av siden og finn bevegelsessensoren. Trykk på navnet til sensoren.
2. Trykk på hendelsesinnstillinger
3. Trykk på varslingsnavnet (blå tekst → «Ut av seng»)



4. Velg ønsket innstilling

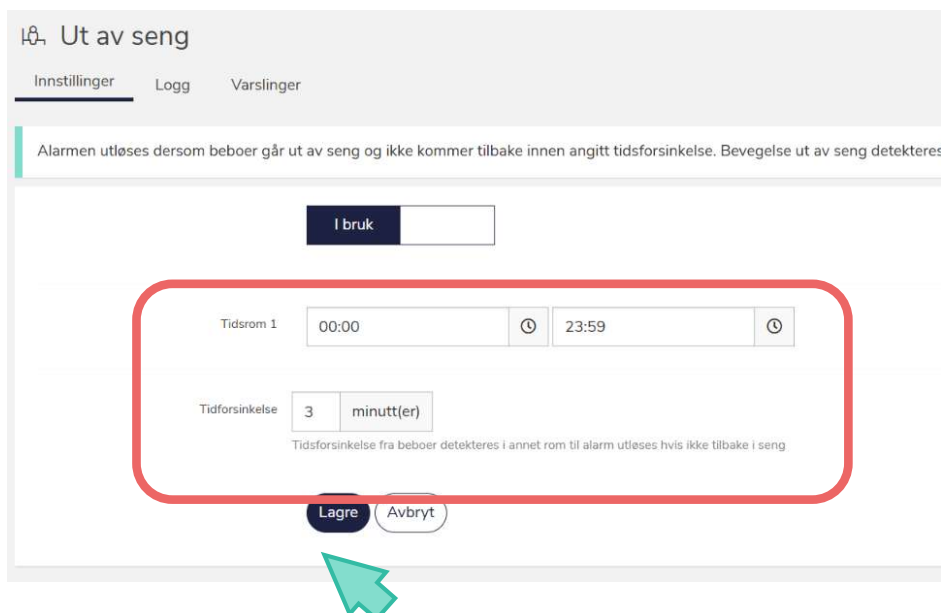

5. Trykk «Lagre»

Konfigurer varsling for bevegelsessensor – ikke i seng


Sensor som er plassert ved seng: Samme fremgangsmåte som på forrige side «Ut av seng»

Sensor som er plassert i et annet rom:

1. Fra boenhetens informasjonssiden, gå til utstyrsfanen på toppen av siden og finn bevegelsessensoren. Trykk på navnet til sensoren.
2. Trykk på hendelsesinnstillinger
3. Trykk på varslingsnavnet (blå tekst → «Ikke i seng»)



4. Velg ønsket innstilling

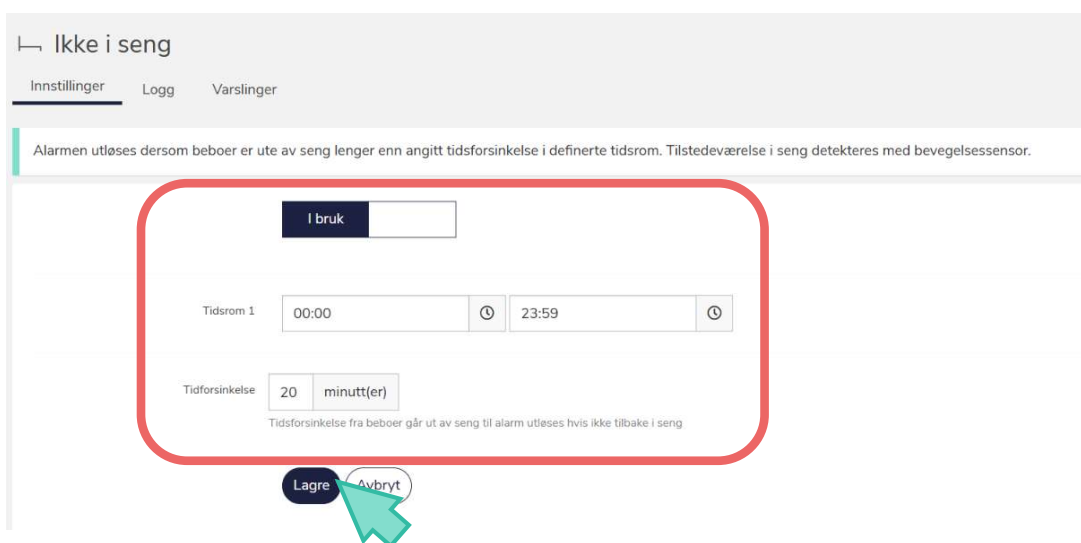

5. Trykk «Lagre»

Vandresensor

Vandresensor

Beskrivelse


WADC-1 er en dørkontakt som kombinerer magnetkontakt med PIR-bevegelsessensorer for å overvåke både åpning av dører og bevegelser i området rundt.



Enheten er spesielt utviklet for personer med demens eller andre som har tendens til å vandre.

Når brukeren åpner døren og beveger seg fra innsiden og ut, sendes et varsel. Sensoren detekterer uønsket vandring ut av rommet.

WADC-1 har to justerbare følsomhetsnivåer som gir fleksibilitet til ulike bruksområder. Ved montering i høyde 2,1–2,3 meter over bakken, dekker hver PIR-sensor et område på ca. 3 x 1 meter ved gulvnivå.

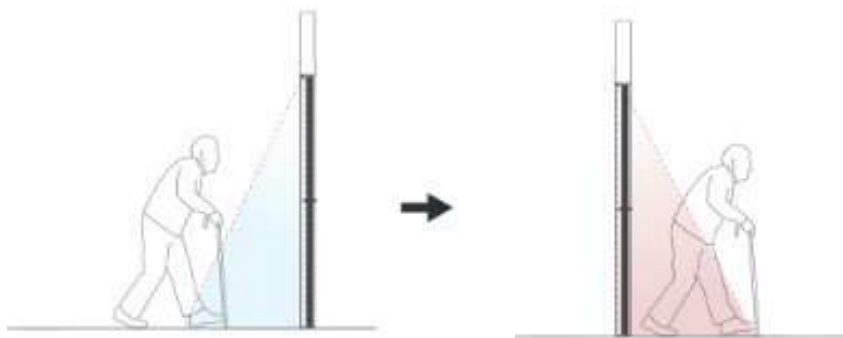

Vandresensor

Montering - generelt

Ved montering i høyde 2,1–2,3 meter over bakken, dekker hver PIR-sensor et område på ca. 3 x 1 meter ved gulvnivå.

Monter siden med grønt lys mot innsiden av rommet. Hvor det er rødt lys skal peke ut av rommet.




WADC-1 skal monteres i dørkarmen rett over døren for å se nedover og overvåke bevegelser rundt døren.

Magneten skal monteres på døren, på motsatt side av den interne magnetbryteren i dørkontakten.

WADC-1 har to ribber på én side (se figur) som markerer plasseringen av den interne magnetbryteren. Magneten må plasseres slik at den flukter med ribbesiden på WADC-1, som vist i figuren under.

OBS: Avstanden mellom WADC-1 og magneten skal ikke overstige 5 mm når døren er lukket.

OBS: Hvis døren med magneten er laget for å åpnes innover, må dere endre på switch bryterne. sett JP5 til ON (sørg for at JP4 også er satt til ON for at innstillingen skal tre i kraft)

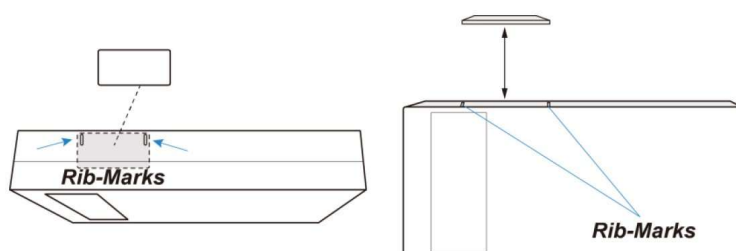

Vandresensor

Montering - generelt

Unngå å montere WADC-1 på metalliske overflater. Hvis enheten må monteres på metall, test at dørkontakten utløses når døren åpnes.

Sensoren kan monteres med skruer eller dobbeltsidig tape.

Skruer:

1. Fjern dekselet ved å skru ut festeskruen.
2. Slå ut hullene (knockouts) i basen.
3. Bruk hullene som mal og bor to hull.
4. Sett inn pluggen hvis du monterer i mur eller gips.
5. Skru fast basen i pluggene med en Philips-skrutrekker.
6. Fest dekselet til basen og stram festeskruen.
7. Fest magneten på døren med den lille biten dobbeltsidig tape. Magnetens må flukte med ribbesiden på dørkontakten. Installasjonen er nå fullført.

Når skal man bruke magneten til vandrealarm?

- Skal man sette på «vandrealarm», må man montere magneten (skal treffe rillene og være maksimum 5 mm fra vandresensoren når døren er lukket).
 - Vandrealarmen utløses ved brudd i magnetkontakt på dør og kan innenfor definert tidsforsinkelse avstilles dersom det registreres bevegelse i boligen (da må man ha minst en bevegelsessensor).
- Ved bruk av «ut av rom» trenger man ikke å montere magneten

Vandresensor

Bedøve vandrealarm

Denne innstillingen i under konfigurasjon av hubben angir hvor lenge vandreralarmen skal bedøves etter at hjemmebesøkende har trykket på gul knapp/FN-knapp på GX-panelet. Dette muliggjør utpassering uten å utløse en uønsket vandreralarm.

Konfigurasjon

Trygghetsalarm GX-8

Avbryt Lagre og oppdater GX gateway

Panel settings

Non-Emergency ⓘ

Speaker Volume ⓘ

Standard(7) ▾

Silent Panel and Device ⓘ

Standard(Av) ▾

Fallsensor Sensitivity (FS-3) ⓘ

Standard(1) ▾

Guard Time ⓘ

Ikke satt ▾

Guard Time Beep ⓘ

Ikke satt ▾

Inactivity Monitoring ⓘ

Bypass Wanderer ▾

Standard(5) ▾

Voice Prompt ⓘ

Standard(Av) ▾

Prompt Volume ⓘ

Standard(1 Min) ▾

Callback Indication ⓘ

Standard(Av) ▾

Ping Sound on Wanderer ⓘ

Standard(Av) ▾

Guard Time for Fall Sensor ⓘ

Ikke satt ▾

Confirm Beep ⓘ

Ikke satt ▾

Bypass Timer ⓘ

3 Min ▾

Ikke satt ▾

Legg til vandresensor i Velferdsportalen

1. Fra boenhetens informasjonssiden, gå til fanen utstyr
2. Trykk på plusstegnet ved siden av gatewayen (NB! Hvis siden er zoomet inn kan det hende du må scrolle mot høyre for å se pluss-tegnet
3. Fyll inn informasjon
 - a) Type: Dørsensor med retningsangivelse
 - b) Plassering: Kontroller at du er på riktig boenhet
 - c) Styringsprosjekt: La stå
 - d) Enhetsnavn: Vandrealarm-**plassering**-**adresse**
 - e) RF-kode: skriv inn nummer som du finner på esken (ved QR-kode)
 - f) Hendelse: «Ut av rom»
4. Lagre

Legg til enhet

Det er kontakt med Trygghetsalarm GX-8 gatewayen som enheten skal kobles til er. Konfigurasjon er mulig.

Type *
Dørsensor med retningsangivelse (ClimaxGx8)

Plassering *
Almas Hus 22

Styringsprosjekt
Løse sensorer (Climax GX-8)

Enhetsnavn *
Vandrealarm-Almas hus 22
Navnet på enheten som vises i brukergrensesnittene

Tilleggsinformasjon

RF-kode *
10 eller 14 tegn. 0-9 og a-f

Hendelse *
Ut av rom

Lagre
Avbryt

Konfigurer varsling for vandresensor

1. Fra boenhetens informasjonssiden, gå til utstyrsfanen på toppen av siden og finn vandresensoren. Trykk på navnet til sensoren.
2. Trykk på hendelsesinnstillinger
3. Trykk på varslingsnavnet (blå tekst)

vandrealarm gang

Oversikt Hendelsesinnstillinger

#	Navn	Innstillinger
1	Ut av rom	I bruk innenfor definerte perioder med forsinkelse ett minutt

4. Velg ønsket innstilling

Ut av rom

Innstillinger Logg Varslinger

Person har forlatt rommet

I bruk

Tidsrom 1 På 00:00 23:59

Tidforsinkelse 1 minutt(er)

Tidforsinkelse fra hendelsen utløses til den sendes ut av boenhet for å gi beboer anledning til å avstille

Lagre Avbryt

5. Trykk «Lagre»

Unngå å utløse alarmer som ansatt

Dersom ansatte på natten ønsker å unngå å utløse vandrealarm når de kommer inn i leiligheten, kan man unngå alarmen ved å trykke på Huben.

Dette gjøres ved å trykke på «FN-knappen» innen 3 minutter etter at du kommer inn i leiligheten.



Husk! For at dette skal fungere må det være en tidsforsinkelse på minimum 3 minutter på varslingen. Dette settes under hendelsesinnstillinger for vandrealarmen.

Magnetkontakt (dørsensor)

Magnetkontakt

Beskrivelse

Dørkontakten overvåker åpning og lukking av utvalgte objekter, som dører eller vinduer.



Dørkontakten festes til karmen på døren som skal overvåkes, mens en aktiveringsmagnet monteres på selve døren eller vinduet. Når døren eller vinduet åpnes, beveger magneten seg bort fra dørkontakten, noe som aktiverer en intern magnetbryter. Dette utløser en alarmmelding.

Enheten har også mulighet til å sende meldinger om signalproblemer og lavt batterinivå.

Dørkontaktens konstruksjon består av et deksel og en base. Dekselet inneholder all elektronikk, mens basen benyttes for å feste enheten. En innebygd sabotasjebryter på kretskortet (PCB) vil varsle sabotasje når man ikke holder dør og magnetkontakt samlet.


Magnetkontakt

Montering

- **Dørkontakten** skal monteres på **dør- eller vinduskarmen**, og **magneten** på selve døren eller vinduet.
- **Avstanden** mellom dørkontakten og magneten må ikke overstige **15 mm** når døren eller vinduet er lukket.
- **Unngå å montere** dørkontakten på metalloverflater. Dersom montering på metall er nødvendig, må du først teste at dørkontakten fortsatt utløses korrekt når døren åpnes.
- Monter dørkontakten **så høyt som mulig** for bedre beskyttelse og rekkevidde.

Slik monterer du dørkontakten:


- Finn et egnet sted på dør- eller vinduskarmen, nær døren/vinduet.
- Merk at dørkontakten har **to ribbeformede merker** på én side (se illustrasjon nedenfor). Disse merkene viser hvor den interne magnetbryteren er plassert.
- Dørkontakten skal monteres **stående eller opp-ned**, slik at siden med ribbemerkenene **vender mot magneten** for korrekt funksjon.

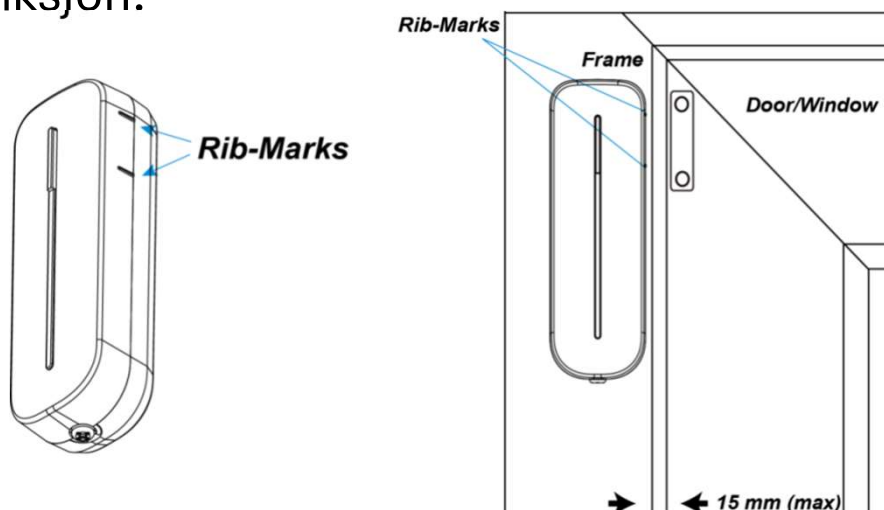

Magnetkontakt

Montering

- Løsne den nederste festeskruen og fjern dekslet fra basen
- Bruk de to monteringshullene i dørkontakten som mal for korrekt plassering av hullene.
- (Valgfritt) Sett inn medfølgende plugg(er) dersom montering skjer i gips eller mur.
- Skru basen fast i veggen eller pluggene.
- Sett frontdekslet tilbake på basen og stram den nederste festeskruen.

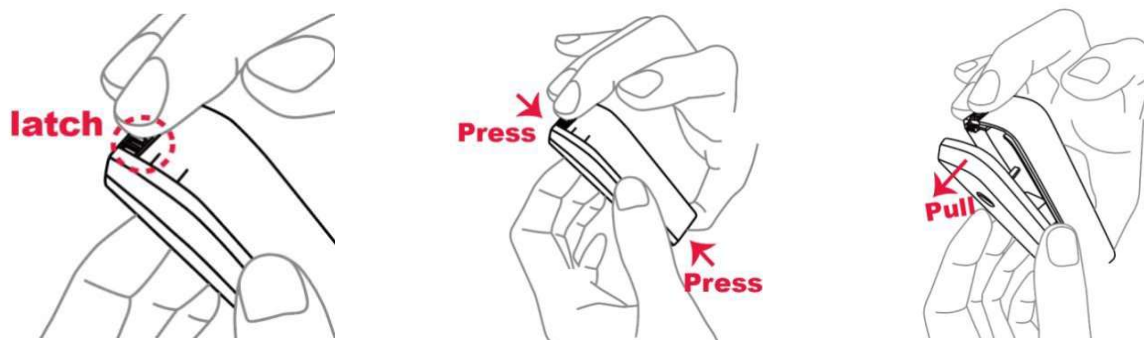

Bruk de to skruehullene på magneten som mal for korrekt plassering.

MERK:

Avstanden mellom magneten og dørkontakten må ikke overstige **15 mm** når døren er lukket.

Magneten må være riktig **justert med ribbmerkene** på siden av dørkontakten. Bruk eventuelt den medfølgende **magnetavstandsstykket** for å oppnå korrekt justering.

b) Skru magneten fast på døren.

c) Sett inn de to hvite plastdekslene i skruehullene på magneten for et penere utseende.

d) **Installasjonen er nå fullført.**

Legg til magnetkontakt/dørsensor i Velferdsportalen

1. Fra boenhetens informasjonssiden, gå til fanen utstyr
2. Trykk på plusstegnet ved siden av gatewayen (NB! Hvis siden er zoomet inn kan det hende du må scrolle mot høyre for å se pluss-tegnet)
3. Fyll inn informasjon
 - a) Type: Dørsensor
 - b) Plassering: Kontroller at du er på riktig boenhet
 - c) Styringsprosjekt: La stå
 - d) Enhetsnavn: Dørsensor-**plassering**-**adresse**
 - e) RF-kode: skriv inn nummer som du finner på esken (ved QR-kode)
 - f) Hendelse: «Vandring»
4. Lagre

Legg til enhet

Det er kontakt med Trygghetsalarm GX-8 gatewayen som enheten skal kobles til er. Konfigurasjon er mulig.

Type *
Dørsensor (ClimaxGx8)

Plassering *
Almas Hus 22

Styringsprosjekt
Løse sensorer (Climax GX-8)

Enhetsnavn *
Dørsensor-Almas Hus 22
Navnet på enheten som vises i brukergrensesnittene

Tilleggsinformasjon

RF-kode *
10 eller 14 tegn. 0-9 og a-f

Hendelse *
Vandring

Lagre
Avbryt

Konfigurer varsling for magnetkontakt/dørsensor

1. Fra boenhetens informasjonssiden, gå til utstyrsfanen på toppen av siden og finn magnetkontakten. Trykk på navnet til sensoren.
2. Trykk på hendelsesinnstillinger.
3. Trykk på varslingsnavnet (blå tekst)

Dørsensor-H102

Oversikt		Hendelsesinnstillinger	
#	Navn	Innstillinger	
1	Vandring	☒ I bruk innenfor definerte perioder	

4. Velg ønsket innstilling

Vandring

Innstillinger
 Logg
 Varslinger

Beboer har beveget seg ut av rommet og vandrer i korridor e.l

I bruk

Tidsrom 1
 På
 22:00
 07:00
 M T O T F L S
 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Tidsforsinkelse
 0 minutt(er)
 0 sekund(er)

Tidsforsinkelse fra hendelsen utløses til den sendes ut av boenhet for å gi beboer anledning til å avstille

Lagre
 Avbryt

5. Trykk «Lagre»