

REGELBUNDEN KONTROLL AV ROOMMATE

SENSIO REKOMMENDERAR GENOMGÅNG AV SENSORER MINST EN GÅNG I MÅNADEN ELLER EFTER BEHOV

- **Har RoomMate klar sikt i rummet?**
 - Flytta möbler eller andra föremål som placerats framför eller rakt under sensorn.
 - Torka av RoomMate med en torr trasa om det finns damm eller spindelnät på den.
 - Tips: Ta hjälp av PDF:n *"5 enkla steg till en bra vinkling av RoomMate"*.
- **Är larminställningar rätt inställda?**
 - Får verksamheten för mycket eller för lite larm?
 - Är det något som kan justeras?
 - Tips: Ta hjälp av PDF:n *"Bedömning av RoomMate-larm"*.
- **Är rumsmarkeringar ritade korrekt?**
 - Finns det markeringar för alla larm som är aktiverade?
 - Redigera rumsmarkeringarna om de inte är rätt.
 - Tips: Markera sänghörnen med tejp för att underlätta markeringsmomentet. Använd PDF:n *"RoomMate rumsmarkeringar"* som hjälp.
- **Fungerar alla larm?**
 - Har larm som vi förväntats få genererats under den senaste månaden?
 - Tänk på att även kontrollera dörrlarm och andra tillbehör som inte är RoomMate.
 - Testa de larm som inte genererats för att säkerställa att dess funktion.
 - Tips: Använd PDF:n *"Larmtyp och beskrivning"* där en beskrivning om hur man testar larm ingår. Vid uteblivet fallarm kan PDF:n *"Fallarm med RoomMate"* med fördel användas.

Fördjupning finns på
efterföljande sidor! →

VINKLING AV ROOMMATE

Se över vinkling av sensorer i Pocket-appen eller i välfärdsportalen

- **Är sensorn vinklad så att den både ser säng och dörrar (om möjligt) bra?**
- **Finns det möbler som stör sensorn?**
 - Exempelvis påverkar mörka möbler/mattor, skinnmöbler, speglar eller kristallkronor sensors förmåga att uppfatta rummet rätt.
- **Finns det föremål nära sensorn som stör bilden, t.ex. en lampa, lift, hylla eller damm som är i vägen i sensors synfält?**
 - Om ja, för en diskussion med den boende om varför det är så viktigt att flytta eller ta bort föremålet.
- **Kontrollera den anonymiserade vyn i Pocket-appen eller i välfärdsportalen för att se hur sensorn uppfattar golvet och rummet. Rummet ska vara tomt under tiden.**
 - Efter vinkling av RoomMate behöver man kontrollera den anonymiserade vyn. Tänk på att vänta någon minut innan sensorn hunnit acklimatiserat sig till rummet.

LARMINSTÄLLNINGAR OCH ROOMMATE

Se över larminställningar som administratör i välfärdsportalen

- **Är rätt larm aktiverade?**
- **Är rätt tidsinställningar aktiverade?**
 - Stämmer fördröjningstiden efter den enskildes behov?
 - Stämmer karantänstiden efter den enskildes behov?
- **Är känsligheten inställd efter den enskildes behov?**
- **Hur ser statistiken ut?**
 - Finns det behov av att justera aktiva larm, t.ex. om det genereras många larm i onödan?
- **Skapa en överskådlig bild av RoomMate-larm.**
 - Diskutera med kollegor om det finns "onödiga larm", bör fler larm vara aktiverade eller bör larm justeras för att uppfylla den enskildes behov?

RUMSMARKERINGAR OCH ROOMATE

Se över markeringar i rummet som administratör i välfärdsportalen

- **Är markeringar ritade på rätt ställe?**

- Markeringen ska vara ritad där möbler befinner sig i verkligheten.
- Markeringar ska inte vara ritade i gråzoner eller blindzoner. Säkerställ att golvet är orange i den anonymiserade vyn.

- **Är markeringarna ritade rätt?**

- Är höjden (y-värdet) på sängen rimligt (0.3-0.9m)?
- Är sängen ritad i den höjd där den enskilde sover?
- Hur är dörrmarkeringar uppritade?
 - Sensorn behöver se personen på båda sidor av dörrmarkeringen.
Dörrmarkeringar ska inte ritas i kanten av bilden.
 - Dörrmarkeringar ritas på golvet en liten bit ifrån dörrkarmen. Om dörren öppnas in i rummet, då bör dörren ritas som ett "v".

- **Blir markeringen gulmarkerad vid uppritning?**

- Funktioner kopplade till det aktiverade larm måste testas. Sensorn uppmärksammar en risk att aktiva larm i den här zonen inte genererar larm.
Det kan t.ex. vara så att markeringen befinner sig långt bort från sensorn.

- **Tänk på möblering**

- Vid inflytt eller ommöblering, bör man föreslå och uppmuntra till möblering som optimerar sensorns synfält över säng och dörrar.
- Om sängen placeras på en ny plats kan man behöva vinkla om sensorn.
 - Vid vinkling: titta i den anonymiserade vyn för att se att golv och säng detekteras bra.
- Se över ovanstående uppgifter relaterade till vinkling, larminställningar och markeringar.

- **Kompetenshantering**

- Vid nyanställning: Ge en introduktion av arbetssättet & RoomMate.
 - Ge behörighet till Sensios system.
 - Håll en genomgång med berörd personal.
 - Ska personen i fråga bli administratör krävs extra utbildning. Avsätt tid för nuvarande administratör att gå igenom välfärdsportalen tillsammans med den nya administratören.
- Genomför kontinuerlig uppföljning och utbildning av personal.

ANDRA PUNKTER ATT KONTROLLERA MED ROOMMATE

- **Skötsel av sensor**
 - Torka av sensorn med torr trasa för att förhindra uppbyggnad av damm och spindelväv framför sensors öga.
- **Kontrollera av statistik**
 - Analysera med jämna mellanrum verksamhetens statistik för att säkerställa ett Digitalt Först arbetssätt. Det är även också ett arbetsredskap för att utreda avvikelser.
 - Titta på data som t.ex. Responstid, antal digitala tillsyner och unika personer som genomför digitala tillsyner.
- **Följ upp avvikelser eller frågor**
 - Informera Sensio Support vid potentiella problem kopplade till RoomMate.