

On the left side of the slide, there are two overlapping circles. The larger one is dark blue, and the smaller one is a lighter shade of blue. They are positioned to the left of the main title text.


Informationsutbildning om RoomMate för omsorgstagare & anhöriga

Utmaningar i omsorgen

sensio



- **Antalet personer över 80 år ökar**
- **Mer komplexa behov på SÄBO och i FSS**
 - Högre andel med kognitiv svikt
 - Små möjligheter att själva kalla på hjälp
 - Högre andel med fallrisk
 - Ökade vårdbehov
- **Ökad personalbrist**
 - Omsorgen behöver öka antalet anställda med ungefär 31 % fram tills år 2031

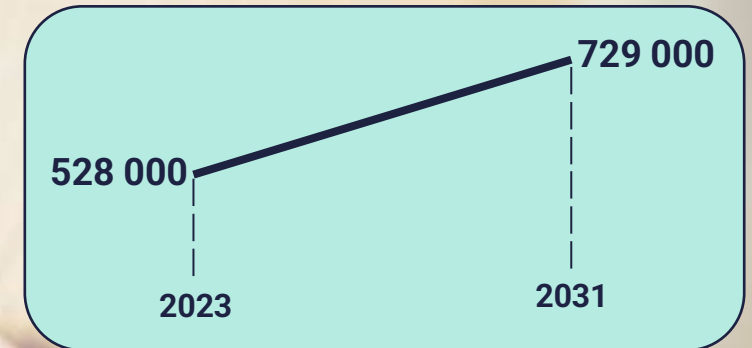

Hur kan den här obalansen hanteras?


sensio



Vad är RoomMate?

sensio

- **Trygghetssensor** som upptäcker avvikelser. Till exempel om någon har **ramlat** eller **befinner sig på golvet**
- Användningen kräver **inga kroppsburna** hjälpmedel
- Användningen kräver **ingen aktiv handling** från den enskilde
- Alla larm och varningar kan **aktiveras** och **schemaläggas** för att passa **varje individs behov**
- Möjliggör **digital tillsyn och tvåvägstal** i samband med larm och/eller **vid planlagda tillsyner**
 - Sensorn skapar då en **livebild** över **aktiviteter** i rummet
 - Det finns ett anonymiseringsfilter i enheten
 - **Inga** bilder eller ljud sparas

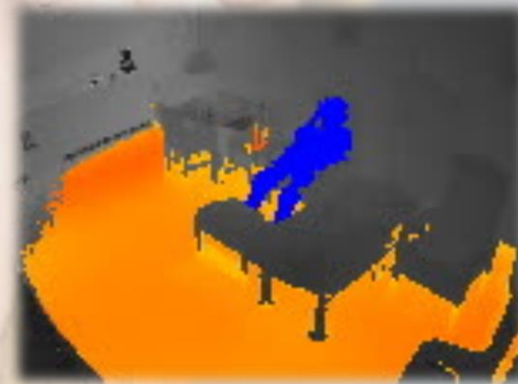

Ett Digitalt Först arbetssätt

sensio



Anna arbetar kväll och hennes kollega är på rast. Tre larm genereras plötsligt samtidigt.

Digitalt först arbetssätt

Anna gör digital tillsyn på samtliga larm och ser följande:

- En brukaren har lämnat stolen och gått och lagt sig i sängen.
- En brukare som lämnade sängen sitter nu i sin fåtölj.
- En brukare som lämnade sängen syns inte i bild men rollatorn står kvar vid sängen.

Traditionellt arbetssätt

Anna ser larmen i larmöversikten och går direkt till den brukare som larmade först/brukar behöva hjälp/har fallrisk.

Annas prioritering baseras på tiden då larmet inkommit alternativt hennes erfarenhet. *Prioriteringen baseras på antaganden.* Om en brukare t.ex. ramlat i badrummet tar det längre tid för henne att uppmärksamma fallet.

Digitalt först-arbetssätt hjälper Anna att identifiera vilken brukare som är i störst behov av stöd just nu.

Digitalt först-arbetssätt hjälper Anna *prioritera utifrån fakta*. I detta scenario kan vi helt enkelt förebygga ett potentiellt fall.


Demonstration av larmshantering



Inga larm

Viktigt att tänka på med RoomMate

sensio

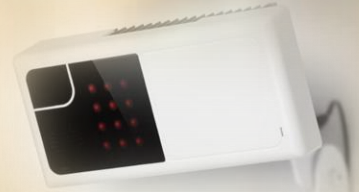


Vid besök i ett rum som har RoomMate

- Informera personalen om besöket så att de kan pausa sensorn
- Digital tillsyn och larm från sensorn är inte tillgängliga om sensorn är pausad
- Trygghetslarm fungerar fortfarande om sensorn är pausad
- **Glöm inte att informera om när besöket är slut!** En pausad sensor kan resultera i att personalen går miste om viktiga larm.



Viktigt att tänka på med RoomMate

sensio

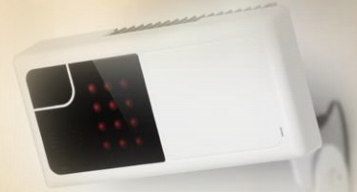

Möblering i ett rum med RoomMate kan påverka sensorns förmåga att uppfatta rummet rätt och generera korrekta larm.

Vanliga föremål som kan påverka sensorn:

- Mörka- och/eller skinnmöbler
- Speglar som sitter mittemot sensorn
- Kristallkronor eller lampor med glaskupor
- Hyllor eller andra föremål rakt under eller nära sensorn
- Möbler som placeras på ett sätt så att golvet inte syns eller kan detekteras



Observera att du alltid ska **informera personal vid en ommöblering** i rummet då det kan påverka larmen!


Sensio Insight & fallanalys

sensio

Vad är Sensio Insight?


En **kartläggningssfunktion** som ger en överblick över händelser i rummet.

Sensio Insight registrerar: **avvikelser, förändrad dygnsrytm, minskad eller ökad aktivitet samt beteenden** som kan innebära en risk.

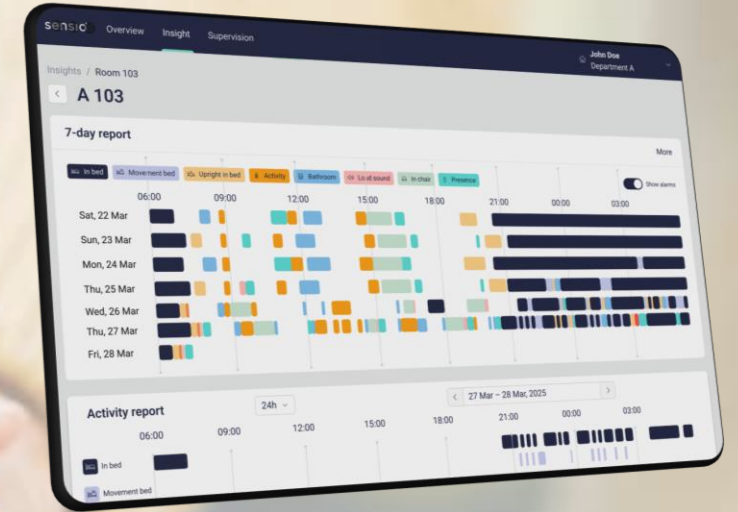

Vad är fallanalys?

En inspelad **videosekvens** när omsorgstagaren ramlar. Detta hjälper personalen att förstå **varför ett fall har inträffat** och möjliggör **enklare fallpreventivt arbete**.

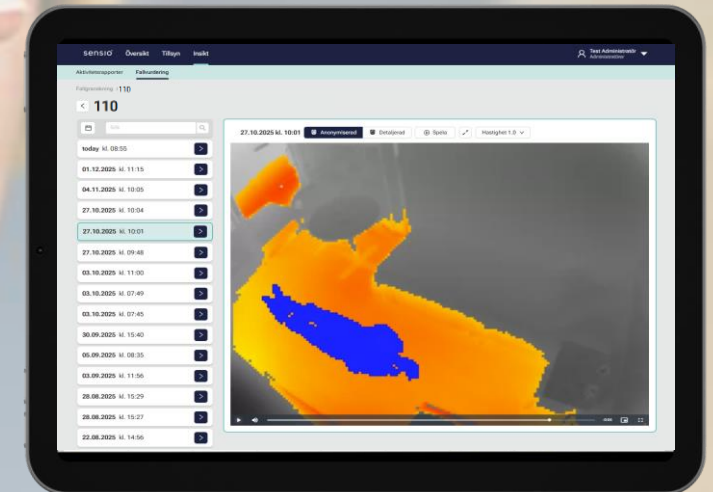

Fördelar med RoomMate


sensio

För omsorgstagare

- Ökad självständighet
- Ökad trygghet
- Ostörd nattsömn

För personal

- Färre fysiska tillsynsbesök nattetid
- Mindre onödig fysisk tillsyn
- Enklare prioriteringsverktyg

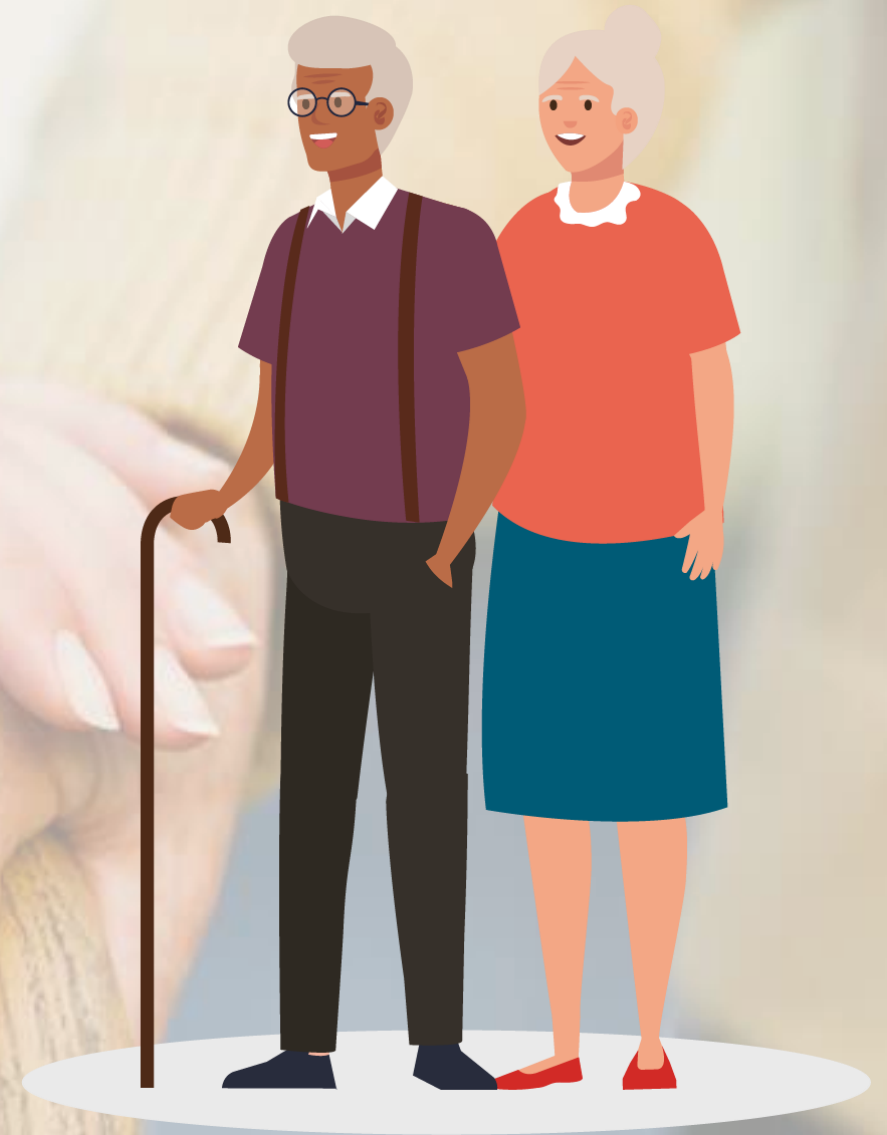

A close-up photograph of a person in a blue shirt holding the hand of an elderly person. The elderly person is holding a wooden cane. The background is blurred, showing a light-colored wall and a blue object. On the left side of the image, there are two overlapping circles: a small teal one and a larger dark blue one.

Tack för att du har lyssnat!