

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a small teal circle at the top and a larger, dark blue circle below it, both partially cut off by the left edge of the frame.


Informationsutbildning om RoomMate för omsorgspersonal

Utmaningar i omsorgen

sensio



- **Antalet personer över 80 år ökar**
- **Mer komplexa behov på SÄBO och i FSS**
 - Högre andel med kognitiv svikt
 - Små möjligheter att själva kalla på hjälp
 - Högre andel med fallrisk
 - Ökade vårdbehov
- **Ökad personalbrist**
 - Omsorgen behöver öka antalet anställda med ungefär 31 % fram tills år 2031

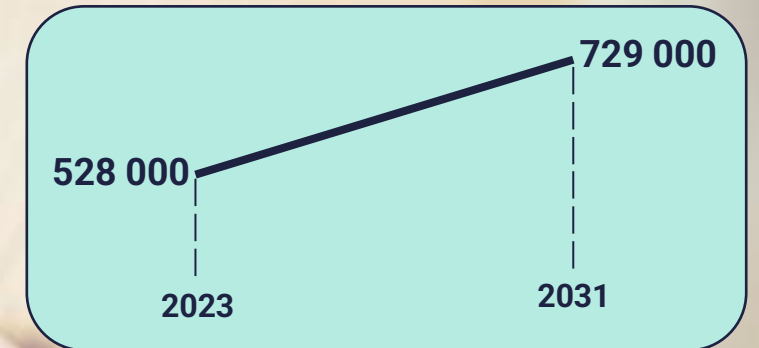

Hur kan den här obalansen hanteras?

sensio




Public

Vad är RoomMate?

sensio

- Trygghetssensor som upptäcker avvikelser. Till exempel om någon har **ramlat** eller **befinner sig på golvet**
- Användningen kräver **inga kroppsburna** hjälpmedel
- Användningen kräver **ingen aktiv handling** från den enskilde
- Alla larm och varningar kan **aktiveras** och **schemaläggas** för att passa **varje individs behov**
- Möjliggör **digital tillsyn och tvåvägstal** i samband med larm och/eller **vid planlagda tillsyner**
 - Sensorn skapar då en **livebild** över **aktiviteter** i rummet
 - Det finns ett anonymiseringsfilter i enheten
 - **Inga** bilder eller ljud sparas

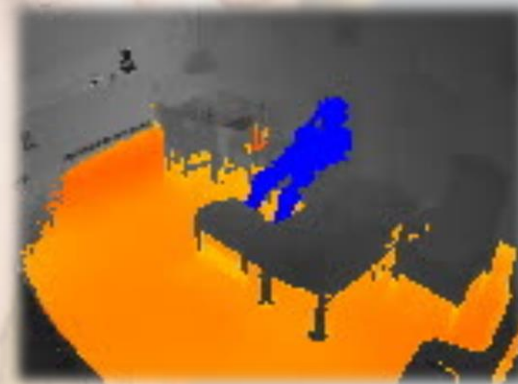

Vilka larm finns tillgängliga?

sensio

-  **Fall** – larmar vid både långsamma och snabba fall
-  **Ljudlarm** - känner av om brukaren t.ex **ropar på hjälp**
-  **Rest sig upp i säng – detektion** innan brukaren lämnar sängen
-  **Lämnat säng** – larmar **direkt** eller om inte brukaren kommer tillbaka
-  **Brist på rörelse i säng** – upptäcker om brukaren **rör sig för lite eller ej ligger i sängen**
-  **Stol-** känner av om en brukare **lämnar en stol eller soffa**
-  **För länge i badrum** – när brukaren varit i angränsande rum (t.ex badrum) länge än vanligt
-  **Aktivitet i rummet** - känner av om brukaren **går runt i rummet**
-  **Dörr** – känner av både **in och utgång** ur rum, larmar direkt eller efter en viss tid

Ett Digitalt Först arbetssätt

sensio



Anna arbetar kväll och hennes kollega är på rast. Tre larm genereras plötsligt samtidigt.

Digitalt först arbetssätt

Anna gör digital tillsyn på samtliga larm och ser följande:

- En brukaren har lämnat stolen och gått och lagt sig i sängen.
- En brukare som lämnade sängen sitter nu i sin fåtölj.
- En brukare som lämnade sängen syns inte i bild men rollatorn står kvar vid sängen.

Traditionellt arbetssätt

Anna ser larmen i larmöversikten och går direkt till den brukare som larmade först/brukar behöva hjälp/har fallrisk.

Annas prioritering baseras på tiden då larmet inkommit alternativt hennes erfarenhet. *Prioriteringen baseras på antaganden.* Om en brukare t.ex. ramlat i badrummet tar det längre tid för henne att uppmärksamma fallet.

Digitalt först-arbetssätt hjälper Anna att identifiera vilken brukare som är i störst behov av stöd just nu.

Digitalt först-arbetssätt hjälper Anna *prioritera utifrån fakta*. I detta scenario kan vi helt enkelt förebygga ett potentiellt fall.


Demonstration av larmshantering



Inga larm

Viktigt att tänka på med RoomMate

sensio

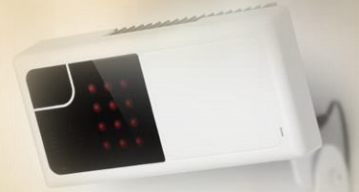

Vid besök i ett rum som har RoomMate


- Sensorn kan pausas vid besök i rummet genom **besökskortet** eller **närvaromarkering**
- Informera omsorgstagaren att säga till när de har besök så att du kan pausa sensorn
- **Digital tillsyn** och **larm** från sensorn är **inte tillgängliga** om sensorn är pausad
- **Trygghetslarm fungerar** fortfarande om sensorn är pausad
- **Glöm inte att instruera omsorgstagaren att meddela när besöket är slut!**

En pausad sensor kan resultera i att du **går miste om viktiga larm.**



Viktigt att tänka på med RoomMate

sensio

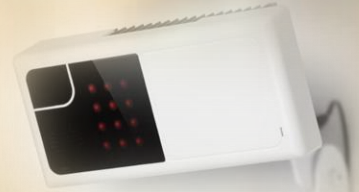

Möblering i ett rum med RoomMate kan påverka sensorns förmåga att uppfatta rummet rätt och generera korrekta larm.

Vanliga föremål som kan påverka sensorn:

- Mörka- och/eller skinnmöbler
- Speglar som sitter mittemot sensorn
- Kristallkronor eller lampor med glaskupor
- Hyllor eller andra föremål rakt under eller nära sensorn
- Möbler som placeras på ett sätt så att golvet inte syns eller kan detekteras



Viktigt att tänka på med RoomMate

sensio

Observera kring möblering!

- Vissa **möbler markeras** i systemet. Vid ommöblering måste markeringar ritas om annars finns risk att larm genereras felaktigt. Informera alltid ditt larmombud vid ommöblering.
- **Placera inte föremål inom ca 1.5 meter** från sensorn.
- Informera ditt larmombud om en del av golvet i den **anonymiserade bilden är grå**
- Informera ditt larmombud om **möbler täcker en golvyta** som omsorgstagaren kan ramla bakom.
- **Informera omsorgstagare** och/eller anhöriga att meddela när rummet ommöbleras.



Sensio Insight


sensio

Vad är Sensio Insight?

En **kartläggningssfunktion** som ger en överblick över händelser i rummet.

Sensio Insight registrerar: **avvikelser, förändrad dygnsrytm, minskad eller ökad aktivitet samt beteenden** som kan innebära en risk.

Används för att kunna ge mer **individanpassad** och **personcentrerad vård**

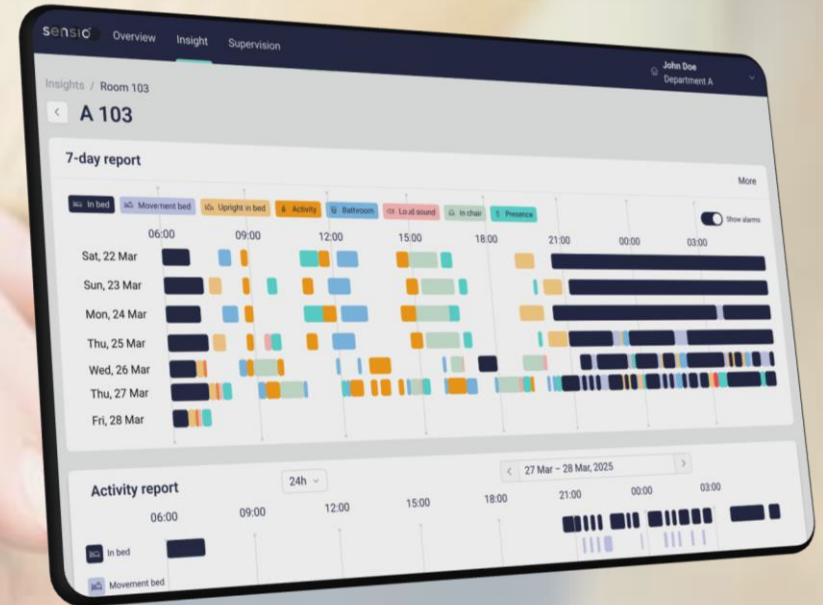

När får funktionen användas?

- När **omsorgstagaren** ger **samtycke**
- Endast **behörig personal** har tillgång till informationen
- Verksamheten ska ha **tydliga rutiner** för när Insight får användas


Om kommunen använder Insight fallanalys

Vad är fallanalys?

En inspelad **videosekvens** när omsorgstagaren ramlar. Detta hjälper personalen att förstå **varför ett fall har inträffat** och möjliggör **enklare fallpreventivt arbete**.

Hur fungerar fallanalys?

- En fallvideo sparas automatiskt när ett fallarm registreras
- Fallvideon kan visas i anonymiserad eller detaljerad bild.
- Inspelningen visar 25 sekunder innan fallet och fem sekunder efter
- Endast behörig personal kan se inspelningen
- Fallvideon sparas i 12 dagar

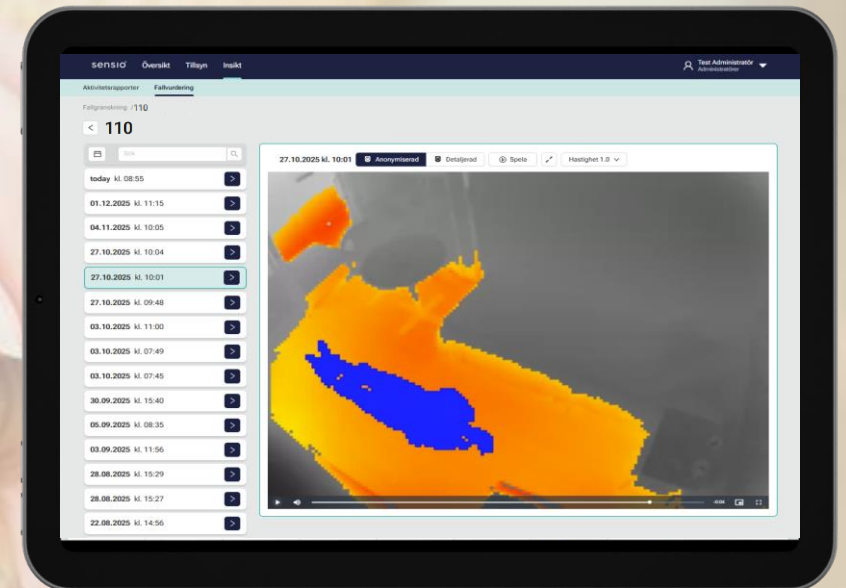

Fördelar med RoomMate


sensio

För omsorgstagare

- Ökad självständighet
- Ökad trygghet
- Ostörd nattsömn

För personal

- Färre fysiska tillsynsbesök nattetid
- Mindre onödig fysisk tillsyn
- Enklare prioriteringsverktyg

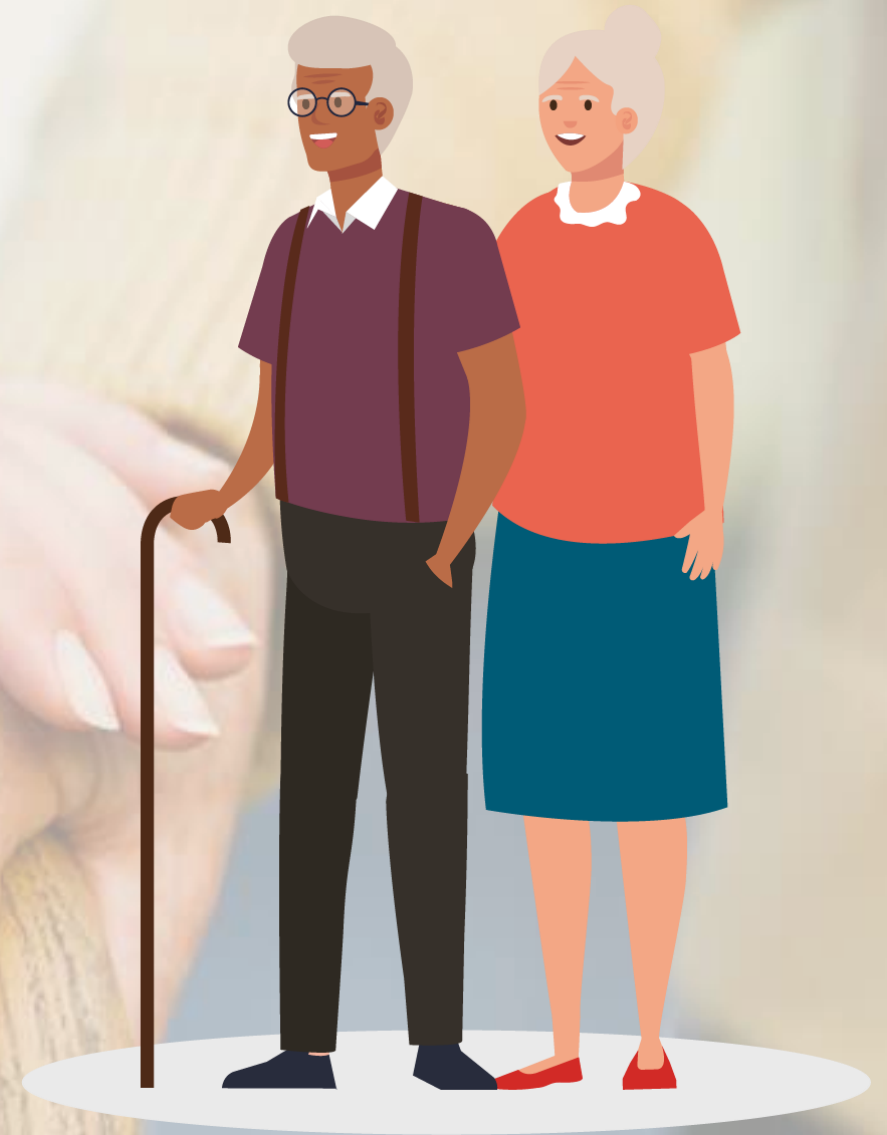

Vad händer innan driftsättning?

sensio

- Fler utbildningstillfällen inför driftsättning för all personal.
- För de som är superanvändare eller administratörer tillkommer fördjupad utbildning både innan och efter driftsättning. Detta kommer ni senare få information om.

A close-up photograph of a person in a blue shirt holding the hand of an elderly person. The elderly person is holding a wooden cane. The background is blurred, showing a light-colored wall and a blue object. On the left side of the image, there are two overlapping circles: a small teal one and a larger dark blue one.

Tack för att du har lyssnat!