

**Mer tid
till Omsorg**

sensio



INFORMATIONsutbildning RoomMate – Digitalt först

UTMANINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN

sensio



PROGNOS ÖVER ANTAL PERSONER ÖVER 80 ÅR




PERSONALBRIST

Äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med ungefär 31 % fram tills år 2031


ANTAL PERSONER PÅ SÄBO ÖKAR

- Många lider av kognitiv svikt
- Ökade vårdbehov
- Hög fallrisk
- Små möjligheter att själva kalla på hjälp

OBALANS I OMSORGEN

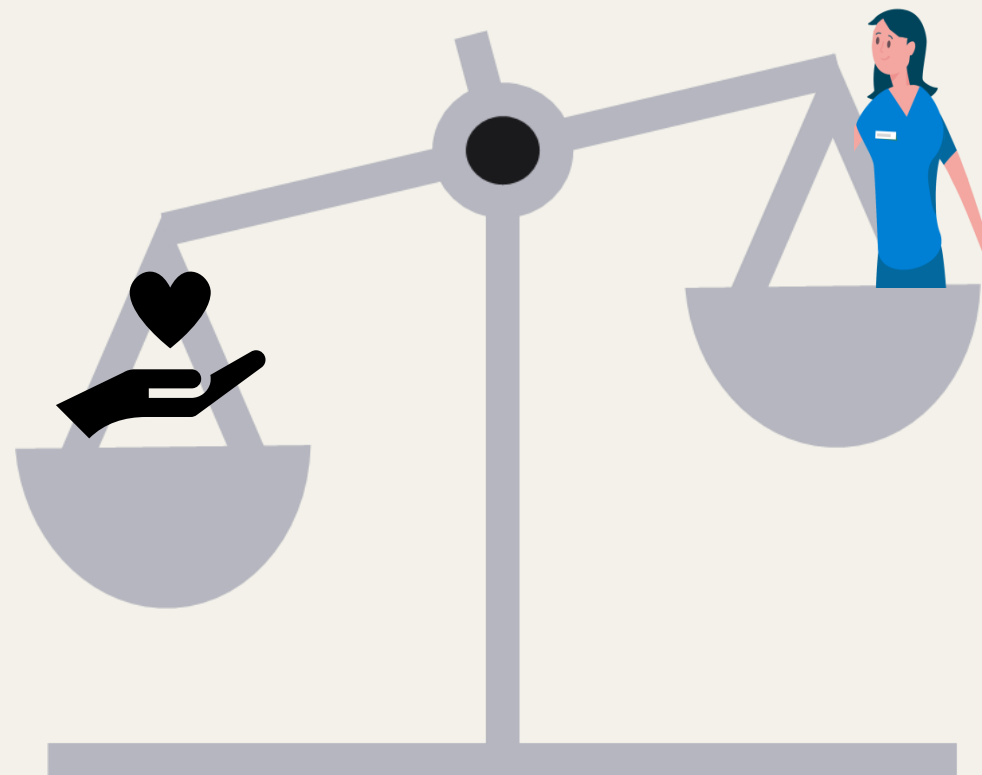

DIGITALT FÖRST

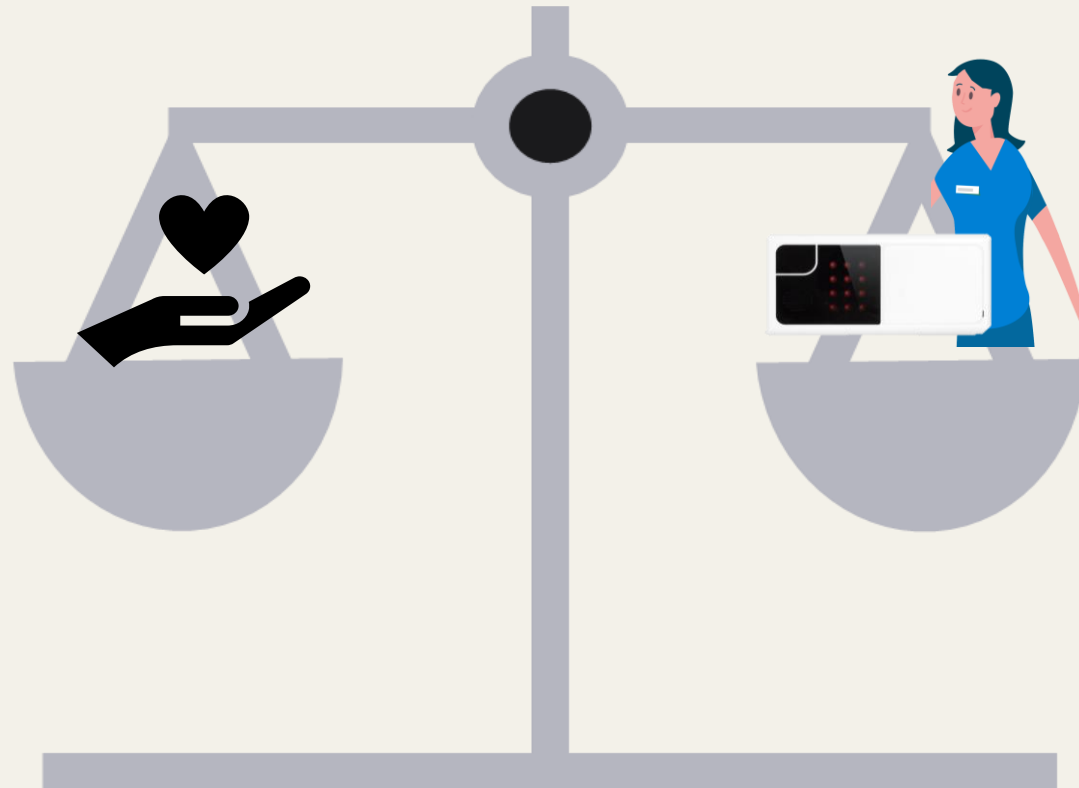




TRADITIONENLLETT ARBETSSÄTT

sensio

LARM INKOMMER

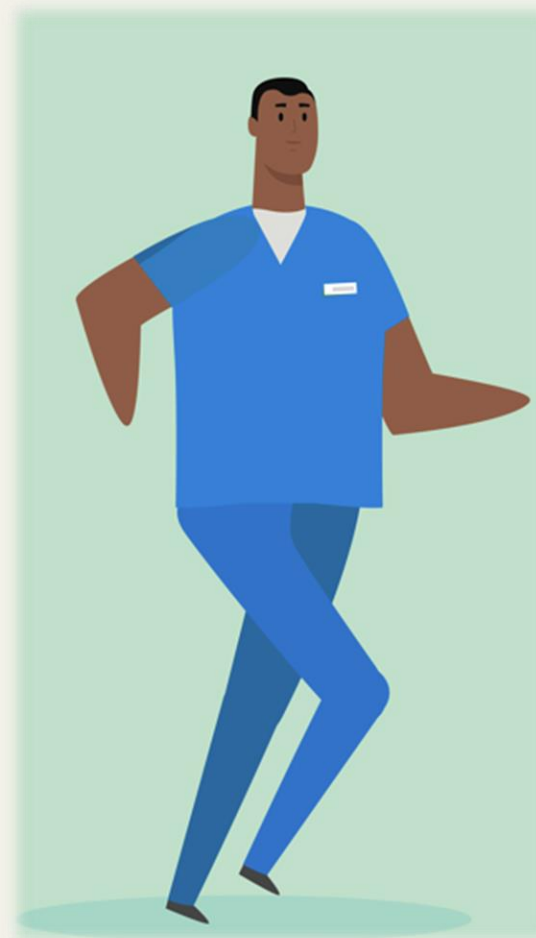


FYSISK TILLSYN




DIGITALT FÖRST

sensio

Vid avvikelser skickas larm till appen.

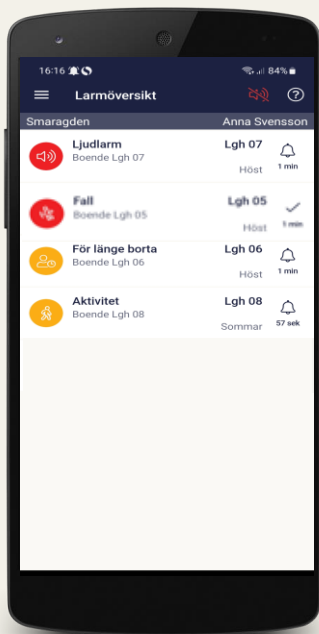


Larmtexten kan ge tillräcklig info så att larmet kan kvitteras.

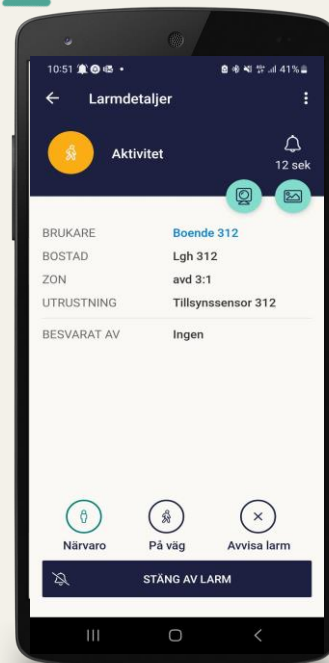

Om du vill se en livebild över händelsen, klicka på kameraikonen. För att ringa till sensorn, klicka på telefonikonen. Kvittera om du fått tillräcklig information.




FYSISK TILLSYN

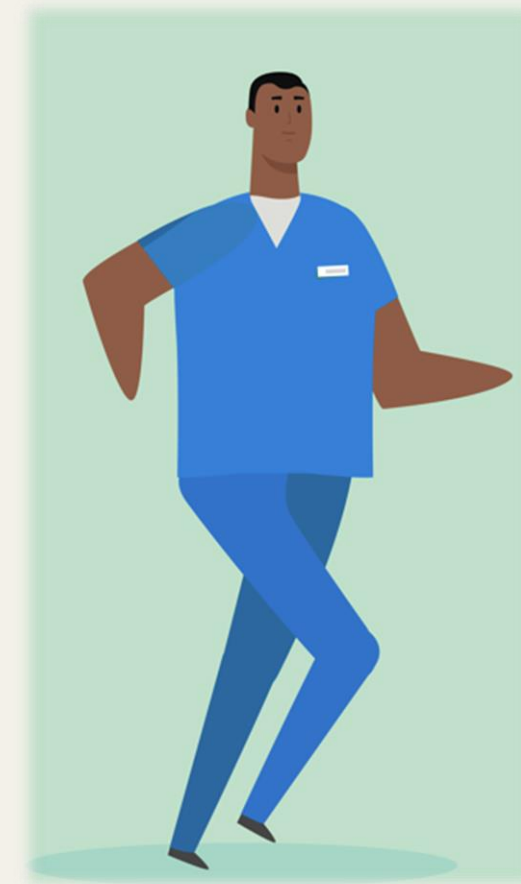

Räcker inte den information du fått, gör en fysisk tillsyn.


VAD ÄR ROOMMATE?

- En sensor som upptäcker avvikelser i ett rum
- Den skickar ut larm vid avvikelser
- Alla larm kan individanpassas
- Digital tillsyn - Anonymiserad bild
- Kräver ingen aktiv handling av brukaren och inga kroppsburna hjälpmedel

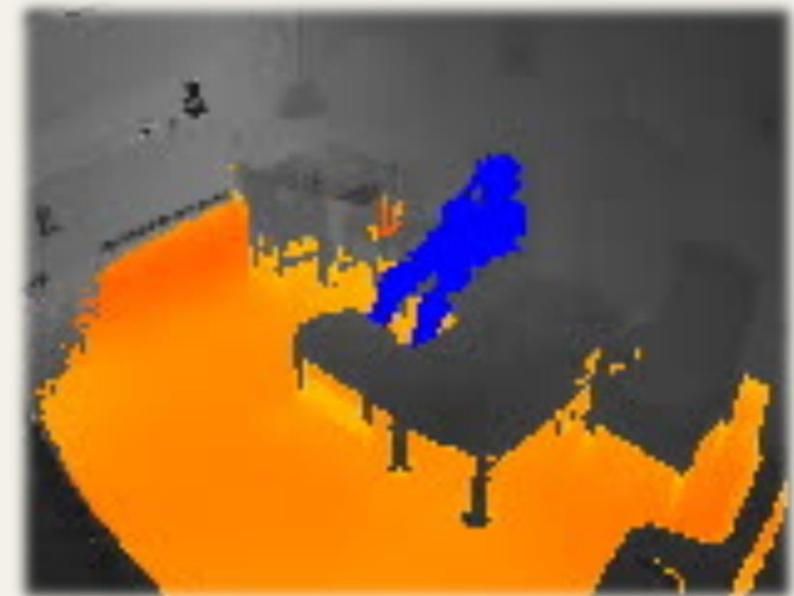

VILKA LARMFUNKTIONER FINNS TILLGÄNGLIGA?

-  **Rest sig upp i säng – detektion** innan brukaren lämnar sängen
-  **Lämnat säng** – larmar **direkt** eller om inte brukaren kommer tillbaka
-  **Stol-** känner av om en brukare **lämnar en stol eller soffa**
-  **Dörr** – känner av både **in och utgång** ur rum, larmar direkt eller efter en viss tid
-  **För länge i badrummet** – larmar om brukaren varit i badrummet onormalt länge
-  **Aktivitet i rum** - känner av om brukaren **går runt i rummet**
-  **Fall** – larmar vid både långsamma och snabba fall
-  **Brist på rörelse i säng** – upptäcker om brukaren **rör sig för lite eller ej ligger i sängen**
-  **Ljud** - känner av om brukaren t.ex **ropar på hjälp**
-  **Tal** - tvåvägskommunikation
-  **Digital tillsyn** – **avpersonifierad ljud och bild** med 3D-sensor

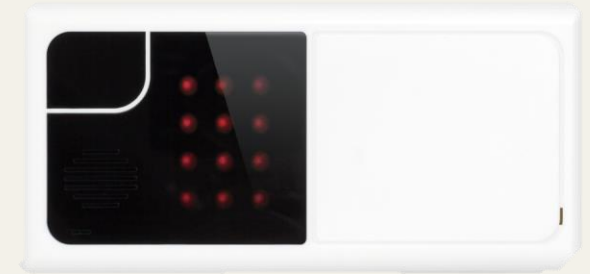

FÖRDELAR MED ROOMMATE

sensio

FÖR BRUKAREN

- Ökad självständighet
- Ökad trygghet - "utan dröjsmål" – SoL
- Ostörd nattsömn
- Utan dröjsmål upptäcka att en person är i behov av hjälp

FÖR PERSONALEN

- Färre fysiska tillsynsbesök nattetid
- Mindre onödig fysisk tillsyn
- Färre besök på grund av falska larm



UTVÄRDERING

sensio

- Inför driftsättning skickas en nulägesanalys ut (2 min)
- Utvärderingen skickas ut ca 2-3 veckor innan uppföljningen



sensio

Nulägesanalys inför RoomMate implementering (Original)

Ni ska nu börja använda RoomMates trygghetssensorer i er verksamhet och vi önskar att du svarar på frågorna nedan för att ge oss en bild av hur befintlig trygghetslarmlösning fungerar för dig och verksamheten.

Hur instämmer du i nedanstående påståenden?



sensio

Utvärdering av RoomMate

Nu har du provat på RoomMate ett tag. Vi skulle uppskatta om du vill ta några minuter och svara på några frågor om hur du tycker RoomMate fungerar för dig och verksamheten.

VAD KOMMER ATT HÄNDA NU?

- Datum för utbildning och driftstart
- Digitalt först: Fördjupningsfilmer och uppföljningsmöte med administratörer och enhetschef



TACK!

Frågor?