



RoomMate[•] trygghetssensor

Information till omvårdnadspersonal

Att tänka på vid användning av RoomMate

- För dig som omvårdnadspersonal

Möblering i ett rum där sensorn sitter

Sensorn bildar en 3D-uppfattning av rummet och varnar när brukaren befinner sig i riskfyllda situationer baserat på de individanpassade larminställningarna. En förutsättning för att sensorn ska uppfatta rummet rätt, är en möblering som inte täcker eller påverkar sensorns synfält.

Exempel på vanliga föremål som kan påverka sensorn:

- Mörka- och/eller skinnmöbler
- Speglar som sitter mitt emot sensorn
- Kristallkronor
- Hyllor eller andra föremål rakt under eller nära sensorn. Detta innefattar även prydnadsföremål ovanpå hyllor nära sensorns öga
- Möbler som placeras på ett sätt så att golvet inte syns eller kan detekteras (gråzoner / blindzoner)

Om möblering påverkar sensorns förmåga att uppfatta rummet kan du som personal behöva att diskutera ommöblering med brukaren och dess anhöriga. I många fall kan det t.ex. räcka att skjuta en hylla 20 cm eller en flytta spegel till en annan vägg för att sensorn ska förstå rummet igen.



Observera!

- Vissa möbler markeras manuellt i sensorns synfält. Om markeringar inte ritas om i samband med en ommöblering av säng, soffa eller fåtölj finns risk att larm genereras fel. Rita alltid om markeringar i samband med ommöblering, informera ditt larmombud som kan göra detta.
- Placera inte föremål inom ca 1.5 meter från sensorn. Detta kan påverka sensorns förmåga att detektera rummet.
- Säkerställ att golvet i den anonymiserade vyn blir orange - då uppfattas rummet rätt!
- Säkerställ att möbler inte täcker golvyta så att brukaren kan ramla bakom möbeln
- **Informera omsorgstagare och anhöriga om att meddela när rummet ommöbleras för att undvika att en riskfylld situation uppstår. Ställ alltid tillbaka säng eller fåtölj om dessa flyttats under ett besök. Är du osäker på hur man kan möblera för bäst resultat? Kontakta Sensio Support!**

Vid besök i ett rum där sensorn sitter

Vid besök är det möjligt att stänga av den digitala tillsynsmöjligheten. Du kan tillfälligt pausa sensorn genom att använda dig av ett besökskort eller närvaromarkera dig i rummet.


En pausad sensor genererar inga sensorlarm, men om den enskilde eller en anhörig önskar hjälp så kan de fortsatt ringa på larmklockan! Dessa larm går igenom.

När sensorn pausas kan du inte göra en digital tillsyn. Ett felmeddelande kommer visas i telefonen och förklarar att digital tillsyn inte är tillgänglig.



Observera!

- Informera omsorgstagaren om att säga till när de har besök så att du kan pausa sensorn.
- Be den enskilde eller anhöriga meddela när de lämnar, så att sensorn kan aktiveras och användas igen.
- **Glömmer man att aktivera sensorn igen, genereras inga larm om en riskfylld situation uppstår!**

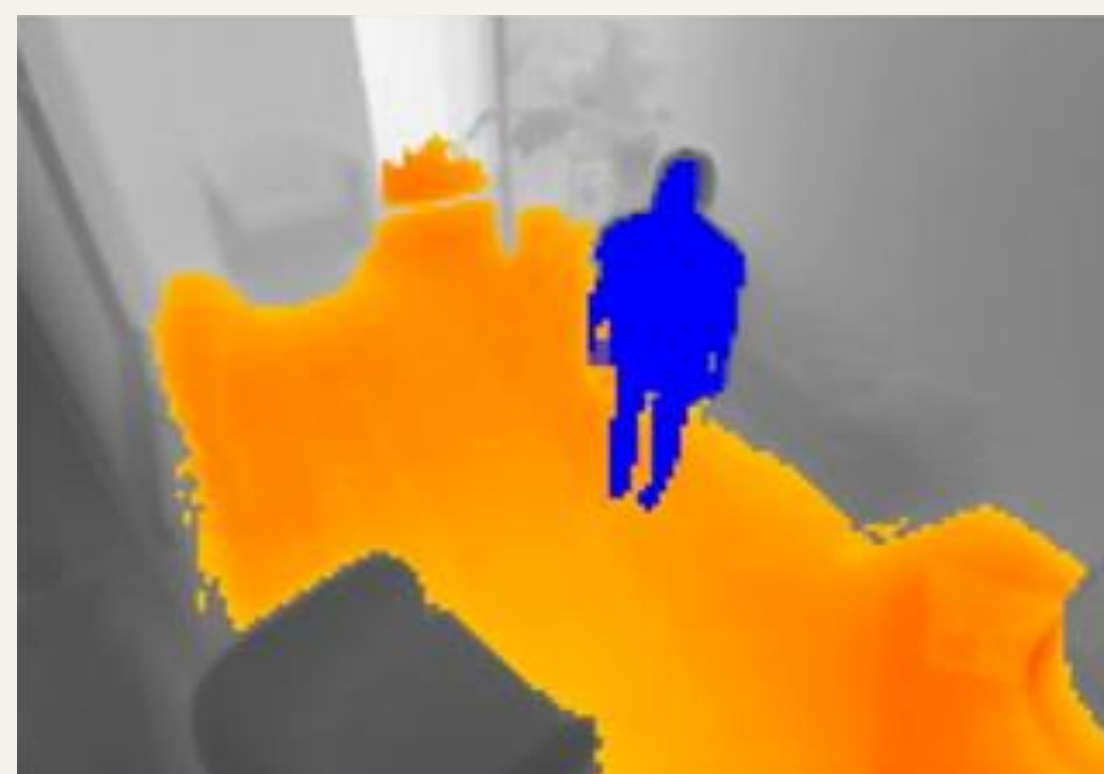

KONTAKTA SENSIO SUPPORT VID FRÅGOR!

- TELEFONNUMMER: 077-4444100
- MEJL: SUPPORT@SENSIOCARE.SE
- SKICKA IN ETT ÄRENDE VIA
[HTTPS://SUPPORT.SENSIOCARE.SE](https://support.sensiocare.se)