



Introduktion av Sensio Insight

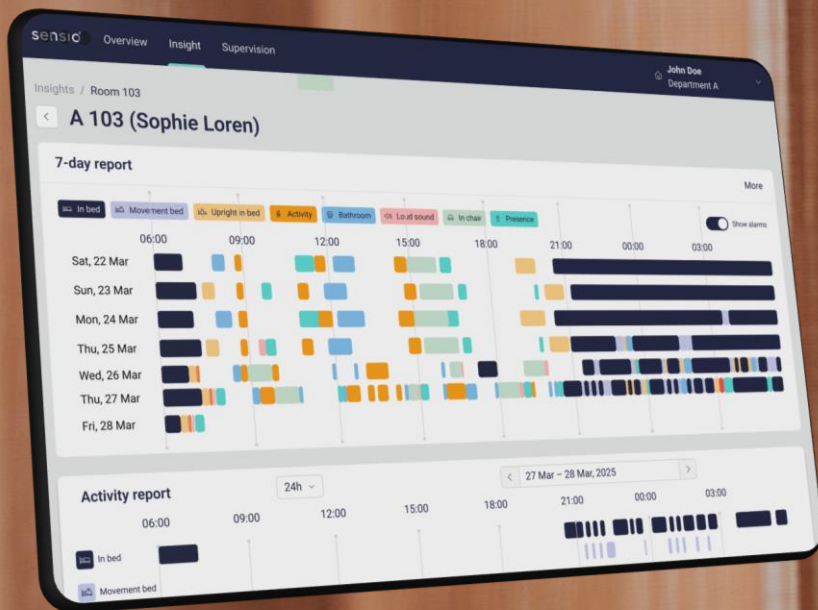

Vad är Sensio Insight?

- En funktion i Sensio365 som bygger på sensordata från RoomMate.
 - Vid aktivering av Insight; registrerar sensorn samtliga händelser i rummet, oberoende vilken larminställning som är aktiverad.
- Insight visualiserar **förändringar och mönster i beteende**, t.ex. avvikelser i dygnsrytm, aktivitet eller riskbeteenden.
 - Möjliggör behörig personal att zooma in på detaljer kring den enskildes aktivitet i rummet.
- Används som **beslutsstöd** för att individanpassa och personcentrera omsorgen.

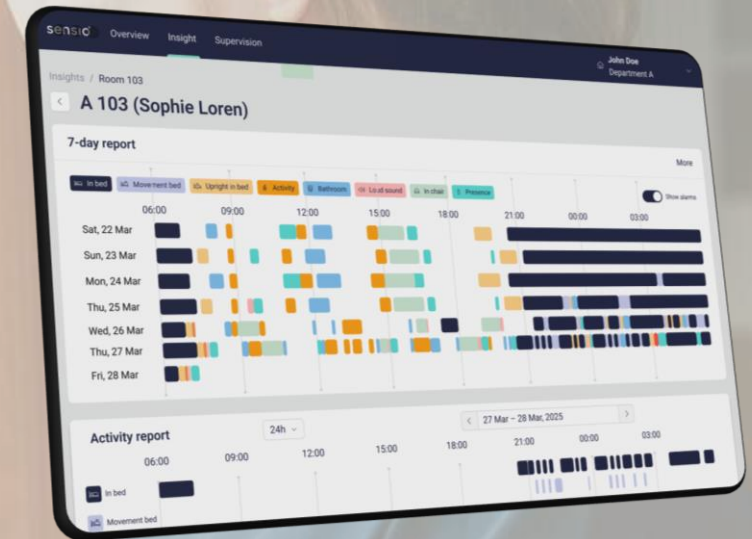

Hur fungerar Insight?

sensio

- Data samlas automatiskt från RoomMate och visas i **7-dagarsrapporter**.
- Möjlighet att filtrera och zooma in på detaljer i enskilda dygn.
- Visar aktiviteter som:
 - Tid i säng
 - Rörelse i säng
 - Upprätt i sängen
 - Rörelse i rummet
 - Ljudnivå
 - Badrumsbesök
 - Tid i stol
 - Närvaro
- Visar även en logg över samtliga händelser i en bostad

Exempelsituationer när Sensio Insight är ett värdefullt verktyg sensio



Brukaren har ramlat

Har dygnsrytmen förändrats?
Hur hanterar vi fallrisken?



Medicinändring

Vad är effekten?



Förändrat sömnmönster och aktivitetsnivå

Vad är orsaken?



Uppföljning av aktiverade larmfunktioner

Har brukaren relevanta
larm aktiverade?



Nyinflyttad?

Hur bedömer vi
vårdtyngd och behov?



Försämring i mående

Vad är orsaken?

sensio

ÖversiktTillsynInsikt

Test
Administratör

AktivitetsrapporterFallvärdering

Zon:SENSIO - demo

☒ Visa brukarnamn

Sök efter rum eller namn

Senaste natten

Lgh 01	Orolig	Fall larm	Trend: Mindre tid i säng	Sett: 01.04.25	Gå till aktivitetsrapport >
Lgh 02	Orolig	Orolig natt	Trend: Ökat antal badrumsbesök	Sett: 01.04.25	Gå till aktivitetsrapport >
Lgh 03	Orolig	1 fallarm, 4h 23 min i säng, 5 larm	Trend: Ökat antal badrumsbesök	Sett: 27.03.25	Gå till aktivitetsrapport >
Lgh 04	Lugn		Trend: Mer tid i säng	Sett: 01.04.25	Gå till aktivitetsrapport >
Lgh 05				Sett: 01.04.25	Gå till aktivitetsrapport >
Lgh 06					Gå till aktivitetsrapport >
Lgh 07	Lugn		Trend: Mer tid i säng	Sett: 01.04.25	Gå till aktivitetsrapport >
Lgh 08	Saknas				Gå till aktivitetsrapport >
Lgh 09	Saknas				Gå till aktivitetsrapport >

sensio

ÖversiktTillsynInsikt

Test
Administratör

Aktivetsrapporter

Fallvärdering

Boendeöversikt / Lgh 02

<

Lgh 02

Senaste natten

Orolig

Fall

I sängen

1

4h 23 m

Larm

Badrum

5

6

I sängen natt

Fall larm

I sängen 24t

Larm

Badrum natt

Mindre tid i sängen denna vecka jämfört med föregående vecka

Förra vecka

Denna veckan

7h 27m

5h 27m

Bar chart showing time in bed for the last 7 days (mån to sön). The y-axis ranges from 0 to 10. The bars show varying levels of time spent in bed, with a general upward trend towards the weekend.

7-dagars rapport

<

30 Sep – 6 Okt, 2025

Ladda ner rapport

I sängen

Rörelse i sängen

Upprätt i sängen

Aktivitet

Badrum

Högt ljud


I stol

Närvaro

Timeline chart showing activity for Mån, 30 Sep, Tis, 1 Okt, and Ons, 2 Okt. The x-axis represents time from 08:00 to 08:00. The chart uses colored bars to represent different activities: I sängen (dark blue), Rörelse i sängen (light blue), Upprätt i sängen (yellow), Aktivitet (orange), Badrum (light blue), Högt ljud (red), I stol (green), and Närvaro (teal). Red alarm icons are present on the timeline for Tis, 1 Okt and Ons, 2 Okt.

Mer information i Insight

- Visar även enlogg över samtliga händelser i en bostad
 - Larm
 - Närvaro
 - Tillsyn
- Går att filtrera både på datum och vilken typ av händelse

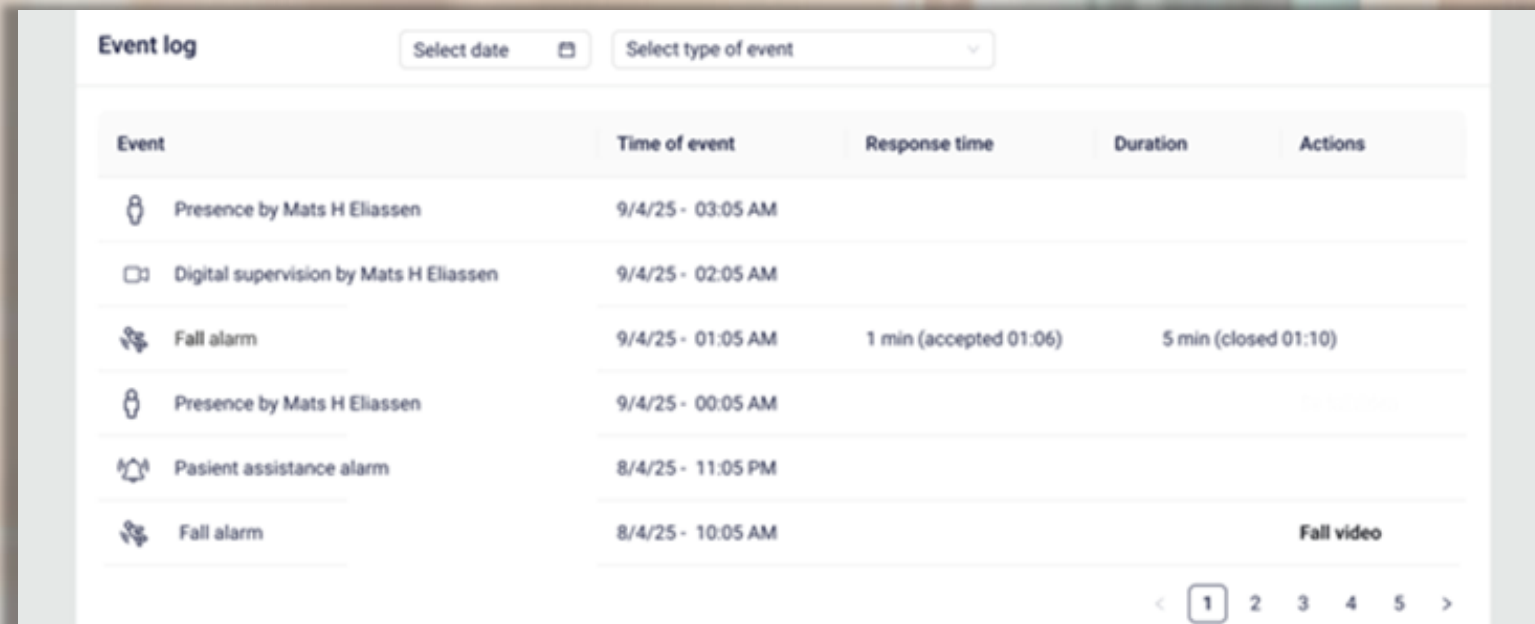

Event	Time of event	Response time	Duration	Actions
 Presence by Mats H Eliassen	9/4/25 - 03:05 AM			
 Digital supervision by Mats H Eliassen	9/4/25 - 02:05 AM			
 Fall alarm	9/4/25 - 01:05 AM	1 min (accepted 01:06)	5 min (closed 01:10)	
 Presence by Mats H Eliassen	9/4/25 - 00:05 AM			View video
 Patient assistance alarm	8/4/25 - 11:05 PM			
 Fall alarm	8/4/25 - 10:05 AM			Fall video

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [>](#)

**Hur kan er verksamhet
använda Insight?**



Lägg till behörighet för att se Sensio Insight

sensio

1. Logga in på kommun.sensio.care
2. Lägg till behörighet för att se kartläggningen under fliken "Anställda" i vänstra spalten.
3. Sök upp ditt namn.

The screenshot shows the Sensio Insight web application interface. On the left, a dark sidebar contains navigation links: 'SENSIO - demo', 'Larmöversikt', 'Rapporter', 'Brukare', 'Bostäder', 'Utrustning', and an 'ADMINISTRATION' section with 'Anställda' (highlighted with a red circle), 'Regelverk', and 'Inställningar'. The main content area is titled 'ANSTÄLLDA' and has tabs for 'Anställda', 'Anställda grupper', and 'Inloggade anställda'. It displays a table of employees with columns for 'Namn', 'E-post', 'Telefonnummer', 'P.Nr.', 'Grupper', 'Utrustning', and 'Primär zon'. A search bar at the top right is also highlighted with a red circle and an arrow pointing to it from the third instruction.

Namn	E-post	Telefonnummer	P.Nr.	Grupper	Utrustning	Primär zon
[Redacted]	[Redacted]		✓	Hela huse SENSIO 3 SENSIO 2 SENSIO		SENSIO - demo
[Redacted]	[Redacted]		✓	SENSIO		
[Redacted]	[Redacted]		✓	Hela huse		SENSIO - demo
[Redacted]	[Redacted]			Hela huse		SENSIO - demo
[Redacted]	[Redacted]		✓	SENSIO		SENSIO - demo
[Redacted]	[Redacted]		✓	Hela huse SENSIO 3 SENSIO 2 SENSIO		
[Redacted]	[Redacted]		✓	SENSIO		SENSIO - demo

Lägg till behörighet för att se Sensio Insight



3. Scrolla ner till "Åtkomst och rättigheter".

4. Klicka i "Visa aktivitetsöversikt" och spara åtkomst.

Åtkomst och rättigheter

Primär zon ⓘ

SENSIO - demo

Primär zon för vald grupp under inloggning är att föredra

Brukare och anhöriga ⓘ

Administrera (redigera + skapa och ta bort) ▼

Från grupprättigheter: Läs allt

Bostäder och utrustning ⓘ

Administrera (redigera + skapa och ta bort) ▼

Från grupprättigheter: Endast läs

Bostäder och utrustning - utökad funktionalitet ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Anställda ⓘ

Administrera (redigera + skapa och ta bort) ▼

Från grupprättigheter: Administrera (redigera + skapa och ta bort)

Visa åtgärdsloggar för anställda ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Regelinställningar för larm ⓘ

Administrera (redigera + skapa och ta bort) ▼

Från grupprättigheter: Administrera (redigera + skapa och ta bort)

Hantera inställningar ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Se händelserapporter ⓘ

☒

Tillgänglig via grupprättigheter

Hantera och stäng larm ⓘ

☒

Tillgänglig via grupprättigheter

Kvittera driftmeddelanden ⓘ

☒

Tillgänglig via grupprättigheter

Ring ett tvåvägssamtal ⓘ

☒

Tillgänglig via grupprättigheter

Utför digital tillsyn ⓘ

☒

Tillgänglig via grupprättigheter

Hitta anställda ⓘ

☐

Tillgänglig via grupprättigheter

Lokalisera brukare ⓘ

☐

Visa aktivitetsöversikt ⓘ

☒

Visa ändringsloggar ⓘ

☒

Tillgänglig via grupprättigheter

Spara åtkomster

Återställ ändringar

Avbryt

Aktivera Sensio Insight

sensio

1. Logga in på "kommun.sensio.care"
2. Klicka på "Bostäder" i vänstra spalten
3. Välj den bostad där Sensio Insight ska aktiveras

tisdag 29 oktober 2024 kl. 09:31 (vecka 44)

Larm 3

- Dörrsensor DC-15 ej stängd Måns 2
SENSIO - demo > Kontoret Måns för 4 dagar sedan
- In i rummet Demo rum
Kontoret > Avd 1 Demo rum för 5 dagar sedan
- Ut ur rummet Demo rum
Kontoret > Avd 1 Demo rum för 5 dagar sedan

Först 1 Sista Visa lista

Närvaromarkeringar
Ingen aktiv

BOSTÄDER

Bostäder Alla zoner + Ny bostad

Område: -- Alla --

Visa 25 rader Visar 1 till 7 av totalt 7 rader Sök:

Namn	Titel	Placering	Brukare	Annan information
⚠ Demo rum	Vardagsrum / Boer	Avd 1	Demo rum	🔔 Patientsignal 📶 Tvåvägstal 📺 Digital tillsyn
✅ Deqa	Vardagsrum / Boer	Kontoret	Deqa	🔔 Patientsignal 📶 Tvåvägstal
✅ Köket	null	Kontoret	Femman	🔔 Patientsignal 📶 Tvåvägstal 📺 Digital tillsyn
⚠ Måns 2	Vardagsrum / Boer	Kontoret	Måns	🔔 Patientsignal 📶 Tvåvägstal
⚠ Rum 1	Vardagsrum / Boer	Kontoret	Rum 1	🔔 Patientsignal 📶 Tvåvägstal 📺 Digital tillsyn
✅ Rum 3	Vardagsrum / Boer	Kontoret	Trean	🔔 Patientsignal 📶 Tvåvägstal 📺 Digital tillsyn

Aktivera Sensio Insight

sensio

4. Bredvid Insight, tryck på "Inställningar"
5. Tryck sedan för att "Aktivera spårning av aktivitetsdata".
6. Tryck på "Spara"

The screenshot shows the Sensio Insight web interface for a 'Demo rum'. At the top, there are navigation tabs: 'Översikt', 'Utrustning', and 'Händelseinställningar'. The 'Händelseinställningar' tab is active. Below the tabs, there are two main sections: 'Larm' (Alarms) and 'Driftmeddelanden' (Operational messages). The 'Larm' section lists three alarms: 'Lämnat stolen' (Left the chair), 'Brist på rörelse i sängen' (Lack of movement in the bed), and 'Aktivitet i rummet' (Activity in the room). The 'Driftmeddelanden' section lists two messages: 'Ingen kontakt' (No contact) and 'Batterifel' (Battery issue). Below these sections, there are two panels: 'Egenskaper' (Properties) and 'Funktioner' (Functions). The 'Egenskaper' panel shows 'Placering' (Location) as 'Avd A' and 'Redigera' (Edit) button. The 'Funktioner' panel lists several functions: 'Larmsignal' (Alarm signal), 'Tvåvägstal' (Two-way talk), 'Digital tillsyn' (Digital supervision), and 'Insight' (Insight). The 'Insight' function is currently active, and its 'Inställningar' (Settings) button is circled in red. A red arrow points from the 'Inställningar' button to the 'Insight' section in the 'Insight' panel below.

Insight

Slå på eller av registrering av aktivitetsdata och fallvideoer

Genom att aktivera spårning av rumets aktivitet kommer RoomMate-sensorn att skicka information om vilken typ av aktivitet sensorn har känt igen i rummet. Denna information kan granskas i Vista-portalen som aktivitetsrapporter.

Aktivera spårning av aktivitetsdata

AV

Stöds av Tillsynssensor, Tillsynssensor 31227 HW 2

Spara

Avbryt

Sensio Insight i Sensio Vista

sensio


1. Öppna en ny webbläsare och logga in i Sensio Vista: ***kommun.sensio.care/vista***
2. Logga in på samma sätt som i pocketappen
3. Här kan du nu se Sensio Insight



Uppgifter till det första uppföljande mötet

- Lägg upp behörighet för att se Sensio Insight
- Aktivera Insight i några lägenheter
- Börja titta på data, vad säger den?
- Välj ut exempel på data till uppföljningsmötet, så diskuterar vi tillsammans vad datan betyder och hur vi kan använda informationen.

Introduktion av Fallanalys i Sensio Vista

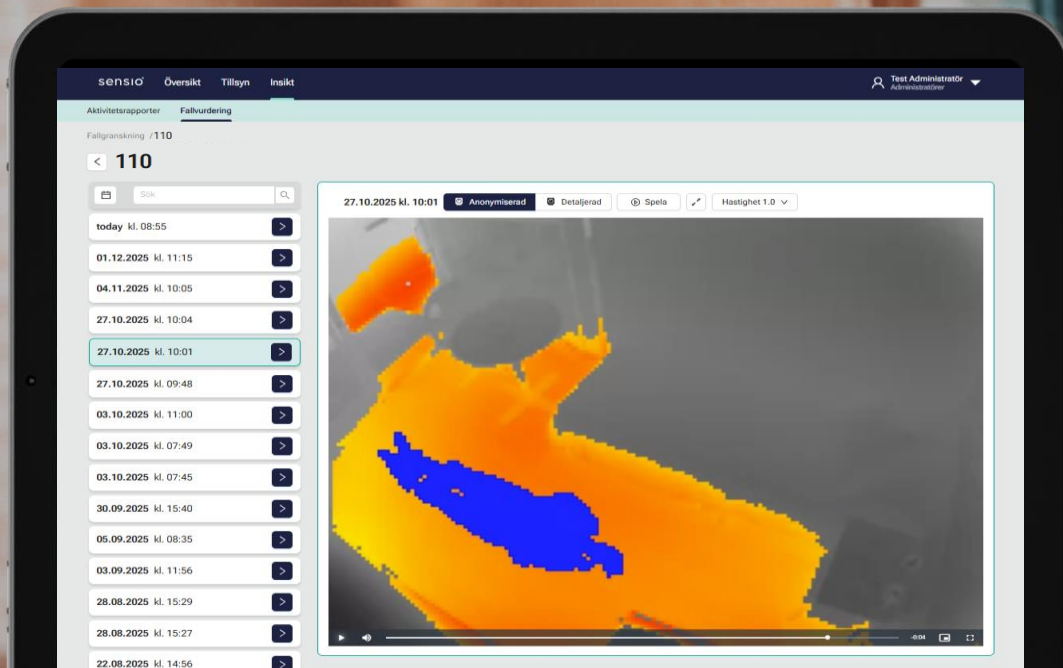

Vad är Fallanalys?


- En funktion i Sensio365 som bygger på sensordata från RoomMate.
 - Vid ett registrerat fall startar RoomMate spela in fallet.
- Fallanalys visualliserar vad som föreligger att omsorgstagaren ramlar.
- Används som **beslutsstöd** för att individanpassa och personcentrera omsorgen.

Hur fungerar Fallanalys?

- Fallvideo sparas automatiskt från RoomMate när ett fallarm registrerats.
- Fallvideo i 6 månader, men går att ställa in efter verksamhetens behov.
- Kan visas både med en anonymiserad vy och en detaljerad vy.



Anonymiserad vy och detaljerad vy

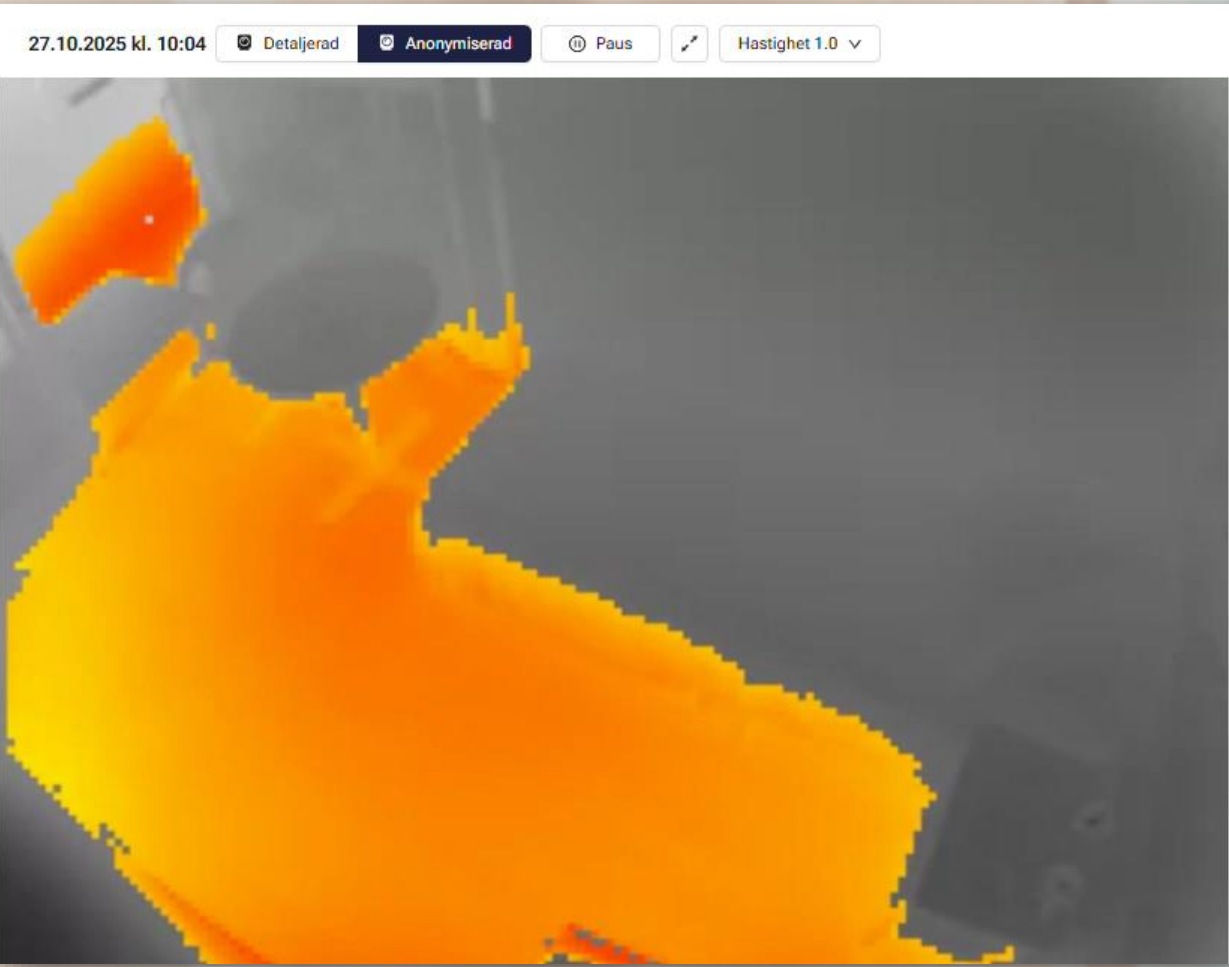

**Hur kan er verksamhet
använda sig av
fallanalys?**



Lägg till behörighet för att se Fallvideo

sensio

1. Logga in på kommun.sensio.care
2. Lägg till behörighet för att se kartläggningen under fliken "Anställda" i vänstra spalten.
3. Sök upp ditt namn.

The screenshot shows the Sensio web application interface. On the left, a dark sidebar contains navigation links: 'SENSIO - demo', 'Larmöversikt', 'Rapporter', 'Brukare', 'Bostäder', 'Utrustning', and an 'ADMINISTRATION' section with 'Anställda' (highlighted with a red circle), 'Regelverk', and 'Inställningar'. The main content area is titled 'ANSTÄLLDA' and has tabs for 'Anställda', 'Anställda grupper', and 'Inloggade anställda'. It displays a table of employees with columns for 'Namn', 'E-post', 'Telefonnummer', 'P.Nr.', 'Grupper', 'Utrustning', and 'Primär zon'. A search bar at the top right is also highlighted with a red circle and an arrow pointing to it from the third instruction.

Namn	E-post	Telefonnummer	P.Nr.	Grupper	Utrustning	Primär zon
[Redacted]	[Redacted]		✓	Hela huse SENSIO 3 SENSIO 2 SENSIO		SENSIO - demo
[Redacted]	[Redacted]		✓	SENSIO		
[Redacted]	[Redacted]		✓	Hela huse		SENSIO - demo
[Redacted]	[Redacted]			Hela huse		SENSIO - demo
[Redacted]	[Redacted]		✓	SENSIO		SENSIO - demo
[Redacted]	[Redacted]		✓	Hela huse SENSIO 3 SENSIO 2 SENSIO		
[Redacted]	[Redacted]		✓	SENSIO		SENSIO - demo

Lägg till behörighet för att se Fallvideo

3. Scrolla ner till "Åtkomst och rättigheter".

4. Klicka i "Granska fallvideor" och spara åtkomst.

Åtkomst och rättigheter

Primär zon ⓘ

-- Ingen --

Primär zon för vald grupp under inloggning är att föredra

Brukare och anhänga ⓘ

Redigera (läs allt + ändra inställning: ▼

Från grupprättigheter: Redigera (läs allt + ändra inställningar)

Bostäder och utrustning ⓘ

Redigera (läs + ändra inställningar) ▼

Från grupprättigheter: Redigera (läs + ändra inställningar)

Bostäder och utrustning - utökad funktionalitet ⓘ

☒ Tillgänglig via grupprättigheter

Anställda ⓘ

Administrera (redigera + skapa och t ▼

Från grupprättigheter: Administrera (redigera + skapa och ta bort)

Visa åtgärdsloggar för anställda ⓘ

☒ Tillgänglig via grupprättigheter

Regelinställningar för larm ⓘ

Administrera (redigera + skapa och t ▼

Hantera inställningar ⓘ

☐

Se rapporter ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Hantera och stäng larm ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Kvittera driftmeddelanden ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Ring ett tvåvägssamtal ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Utför digital tillsyn ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Hitta anställda ⓘ

☒

Lokalisera brukare ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Visa aktivitetsöversikt ⓘ

☒

Granska fallvideor ⓘ

☒

Visa ändringsloggar ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Hantera rumsmarkeringar ⓘ

☐ Tillgänglig via grupprättigheter

Spara åtkomster

Återställ ändringar

Avbryt

Public

Aktivera Sensio Insight

sensio

4. Bredvid Insight, tryck på "Inställningar"
5. Tryck på "Registrera anonym fallvideo".
Tryck sedan på "Registrera detaljerad fallvideo".
6. Tryck på "Spara"

The screenshot shows the Sensio Insight web interface for a 'Demo rum'. The top navigation bar includes 'Rumsmarkeringar', 'Lägg till utrustning', 'Loggar', and a menu icon. The main content area is divided into several sections:

- Larm** (3): A list of alarms including 'Lämnat stolen', 'Brist på rörelse i sängen', and 'Aktivitet i rummet', all for 'Demo rum'.
- Driftmeddelanden** (2): A list of messages including 'Ingen kontakt' and 'Batterifel', both for 'Trygghetsalarm GX-8'.
- Egenskaper**: A section for 'Placering' and 'Avd A'.
- Brukare**: A section for 'Demo rum'.
- Funktioner**: A list of features including 'Larmsignal', 'Tvåvägstal', 'Digital tillsyn', and 'Insight'. The 'Insight' feature is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it.

Genom att aktivera fallvideorecension kommer RoomMate-sensorn att spela in en video när den upptäcker ett fall. Videon kan granskas i Vista-portalen och raderas efter 14 dagar. Om en detaljerad fallvideo föredras, är detta endast ett alternativ om funktionen är aktiverad för din Sensio 365-leverantör.

Registrera anonym fallvideo ☒

Stöds av Tillsynssensor, Tillsynssensor 31227 HW 2

Registrera detaljerad fallvideo ☒

Stöds av Tillsynssensor, Tillsynssensor 31227 HW 2

Spara

Avbryt

Public

Uppgift inför Insight-uppföljningsmöte

sensio

- Ta med er exempeldata som ni vill gå igenom tillsammans med Sensio
- Ta med er ett exempel på när Sensio Insight varit en stöttning för er verksamhet.
- Förbered så att ni i uppföljningsmötet kan dela skärm och visa data för Sensio

Tack för att du lyssnat
Lycka till!

