

RoomMate

Installasjonsveileder

Innhold

• Introduksjon og ansvarsfordeling	2
• Ønsket oppsett ut fra kartlegging	3
• Optimal plassering av RoomMate basert på ønsker	4
• Plassering av RoomMate	7
• Modulasjonsfrekvens	12
• Installasjon av RoomMate	13
• Installasjon av 4G-ruter og strømforsyning	16
• Kontroll av plassering	23
• Stikk-klistermerke	24
• Sluttdokumentasjon	25
• Oppsett av markeringer og varsler	26
• Besøkskort	28

Demonteringsveileder

Innhold

• Slette sensorer fra Velferdsportalen	30
• Demontering og klargjøring av sensorer	31
• Fjerne 4-G ruter	32

Introduksjon og ansvarsfordeling

Begrepsavklaring:

- Sensor = RoomMate
- Funksjoner = Det man kan utføre og aktivere på sensoren, slik som digitalt tilsyn og hendelsesvarslinger
- Careium= Montør fra Careium

Merk:

- Bydelen har ansvar for å sende inn bestilling på riktig antall RoomMate-enheter, samt gjøre en kartlegging av funksjoner og varslinger som er ønsket på sensorene. Montør medbringer i tillegg ekstra sensorer og rutere som kan monteres ved behov for flere enheter.
- Careium installerer sensor på vegg etter avtale med representant fra bydelen
- Careium har med laptop og justerer sensor. Ved behov for bistand tar Careium kontakt med Sensio
- Avslutningsvis legger bydelene sensor(er) i Velferdsportalen, knytter sensor(er) til beboer og boenhet. Det er bydel som har ansvar for å gjøre markeringer og aktivere varslinger.
- Representant for bydelen må være til stede ved montering frem til plassering av sensorene er avklart med montør. Hvis det er pårørende tilstede som kan låse etter montør kan bydel forlate monteringen når plassering er avklart og de har sjekket at det fungerer.

I installasjonsveilederen er det markert på alle sider hvem som har ansvar for utførelse. Merk at på enkelte steg er det et samarbeid mellom bydel og Careium

Ønsket oppsett ut fra kartlegging

PJ1

Ansvarlig utførende: Bydel

1. Få oversikt over de ulike rommene

- Soverom
- Stue
- Gang
- Kjøkken
- Med mer



2. Identifiser hvilke varslinger som er mulige basert på rommets utforming

- Fall
- Oppreist i seng
- Ingen bevegelse i seng
- Ut av seng
- Ut av stol/sofa
- Går inn i rom
- Går ut av rom
- Aktivitet i rommet
- For lang tid på badet
- Høy lyd

RoomMate kan registrere ulike hendelser for én beboer per rom, så lenge de skjer innenfor synsfelt og rekkevidde. Fall, forlatt rom/inn i rom, høy lyd og aktivitet i rom vil detekteres med flere enn 1 person i rommet. Digitalt tilsyn fungerer uavhengig av antall personer i rommet.

Lysbilde 3

PJ1

Innledene i stedet for ønsket

Patricia Sofia Jacobsen Jardim; 2026-01-14T08:17:56.909

Optimal plassering av RoomMate basert på ønsker


Ansvarlig utførende: Montør i dialog med bydel

NB: Ved behov for bistand til plassering av sensor kontakter Careium Sensio

Tips til hvordan møbler og hjelpemidler bør plasseres


Seng

- Mot vegg (hvis mulig)
- Bør plasseres mot vegg på **motsatt side** av RoomMate-plassering

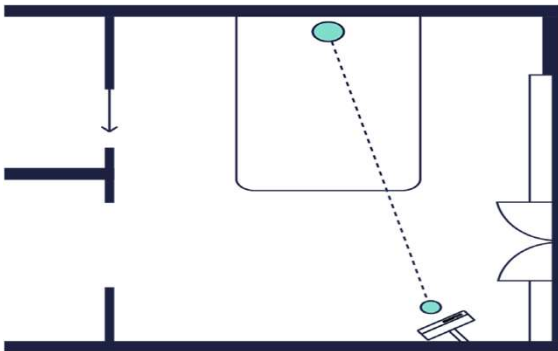


Speil og tv-skjermer

- Bør være utenfor RoomMate sitt synsfelt for å unngå feiltolkning

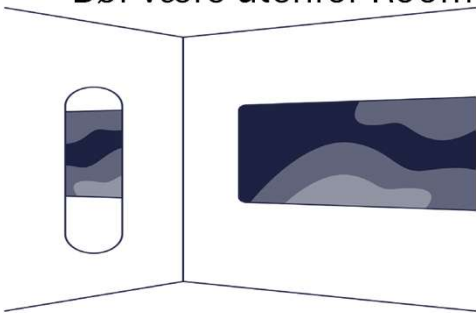

Område uten møbler og dekor

- RoomMate trenger **1 meter** klaring rundt seg som er fri for møbler, tepper, gardiner, lamper, speil og andre hindringer

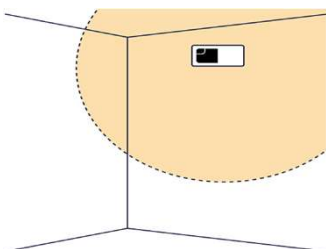

Optimal plassering av RoomMate basert på ønsker


Ansvarlig utførende: Montør i dialog med bydel

NB: Ved behov for bistand til plassering av sensor kontaktes Sensio

Tips til hvordan møbler og hjelpemidler bør plasseres


Avstand til tak, gulv og vegg

- RoomMate skal monteres 15-20 cm under taket (maks 275 cm over gulv) og ca. 50 cm fra vegg.

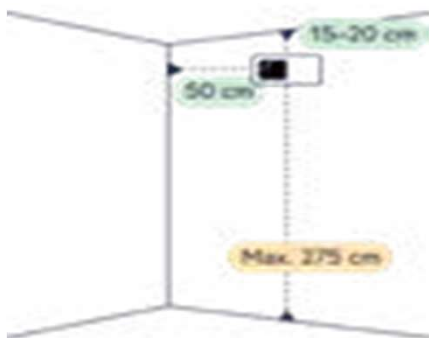


Vinduer og inngangsdører

- Bør være utenfor synsfelt for å unngå registrering av bevegelser utenfra.

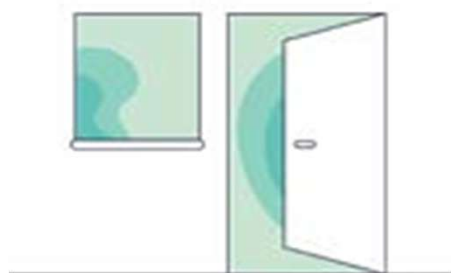

Sterkt sollys

- Inneholder IR-stråling som kan forstyrre sensorens funksjon.

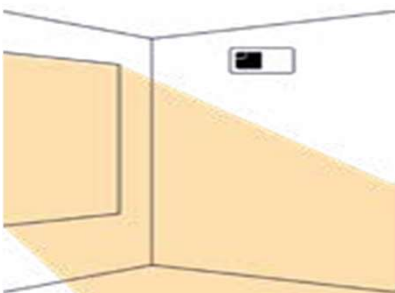

Optimal plassering av RoomMate basert på ønsker

Ansvarlig utførende: Montør i dialog med bydel

NB: Ved behov for bistand til plassering av sensor kontaktes Sensio

Tips til hvordan møbler og hjelpemidler bør plasseres

Unngå mørke farger og matte materialer

- Kan absorbere IR-stråling og redusere funksjonaliteten.




Plassering av RoomMate


Ansvarlig utførende: Careium

NB: Representant fra bydel må være tilstede, og være tydelig på ønskede funksjoner.

Plasser sensoren på et stativ (gjørne i et hjørne med god oversikt over prioriterte funksjoner slik som seng, stol/sofa og dører til inngang/kjøkken/gang og bad.

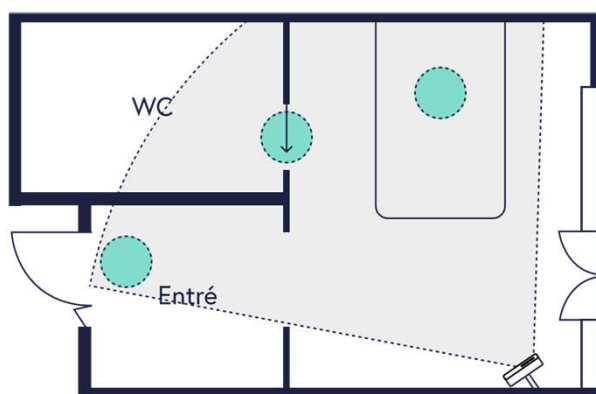

Unngå plassering rett over dører og vinduer som kan åpnes eller for plasseringer nært gardiner. Det er viktig å være oppmerksom på at lamper som henger ned også kan forstyrre synsfeltet til sensoren.

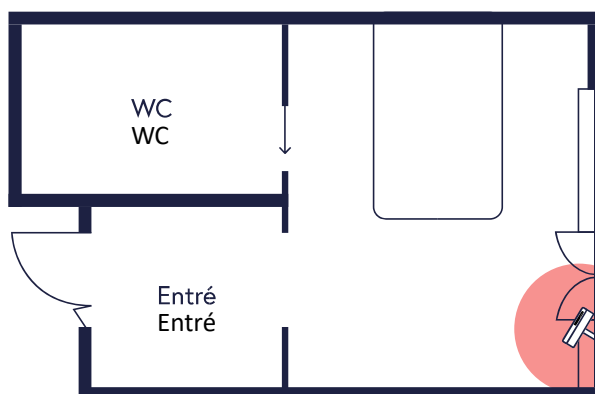

Plassering av RoomMate

Ansvarlig utførende: Careium *

For å kunne verifisere om plasseringen er korrekt, må sensoren legges inn i Velferdsportalen. Dette gjøres på følgende måte:

1. Logg inn i velferdsportalen (helto.slo.sensio.care)
2. Careium velger lokasjonen «Careium Test». NB: denne lokasjonen er kun ment for å teste plassering til sensorer
3. Gå til boenhetens informasjonsside. Velg «Testveien 1»
4. Trykk «Legg til utstyr»
5. Fyll inn informasjon
 - Type: Tilsynssensor (RoomMate365)
 - Styringsprosjekt: La stå
 - Enhetsnavn: RoomMate-**Leilighetsnavn**
 - NB! Hvis det er flere RoomMate i samme leilighet bør navnet indikere hvilket rom eller nummer sensoren har.
 - Serienummer: Finner du på undersiden av sensoren
 - Trykk «Lagre»

Legg til enhet

Type *

Tilsynssensor (RoomMate365)

Plassering

🏠 Leil. DEMO

Styringsprosjekt *

Digitalt tilsyn (Digitalt tilsyn)

Enhetsnavn *

RoomMate-DEMO

Navnet på enheten som vises i brukergrensesnittene

Tilleggsinformasjon

Serienummer *

123456

Lagre

Avbryt

*Hvis bydel selv ønsker å ha med egen laptop kan man legge sensor direkte på rett boenhet og beboer. Se instruks på side 27

Plassering av RoomMate

Ansvarlig utførende: Careium, verifiseres sammen med representant fra bydel

Ved montering av ny sensor så skal plassering først testes ut og bekreftes ved bruk av en «tripod» (stativ) før sensoren blir skrudd fast i veggen. Ved utskiftning av sensor kan gammelt feste brukes til test.

Dette trenger du:



RoomMate



Laptop



Tripod

Plassering av RoomMate

Ansvarlig utførende: Careium


NB: Avklaring av at plassering fungerer må gjøres med representant fra bydel tilstede.

Careium logger inn i Velferdsportalen og åpner digitalt tilsyn for RoomMate-enheten (Du finner sensor på boenhet under utstyr fanen – trykk deg inn på sensoren - så på rommarkering fanen – nederst på siden finner du anonymisert video/detaljert video)


Husk å **rekalibrere sensor** når man plasserer eller flytter sensor slik at den «lander»(registrerer) gulvet korrekt. NB! Det skal ikke være noen i rommet når man recalibrerer.



Kontroller både anonymisert og detaljert video.

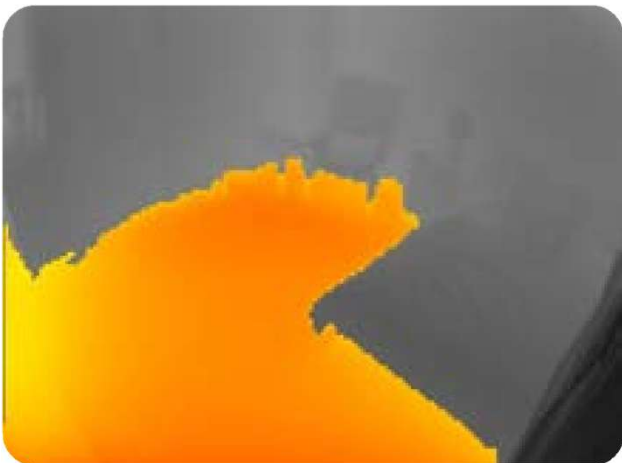

Eksempel på sensor som er feil plassert – plassert tett på gardin og i et hjørne.

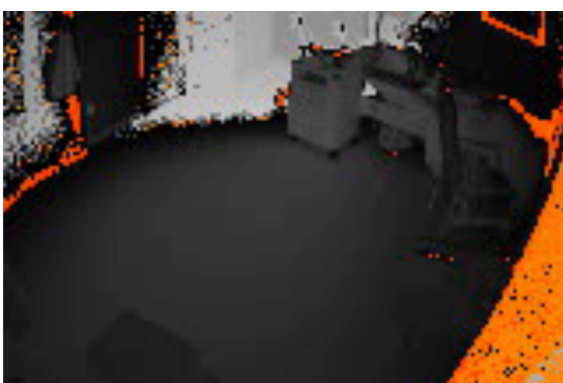

Plassering av RoomMate

Ansvarlig utførende: Careium

Careium går gjennom sjekklisten ved test av plassering:

- ☐ Gulvet har en stabil oransje farge, uten flimmer eller svarte felt.
- ☐ Bildet dekker seng, stol, baderomsdør og inngang, eller det som er mulig i forhold til rommet.
- ☐ Få blindsoner.
- ☐ Lite tak og vegger synlige i bildet.
- ☐ Ingen vinduer eller gardiner i bildet.



- ✓ Plassering er kontrollert og godkjent.
- ✓ Sensoren kan nå bli montert på veggen!



Er det behov for å justere fokus ? Bruk instruksene på neste side

Modulasjonsfrekvens

Ansvarlig utførende: Careium

NB: Bydel skal bli informert av Careium hvis Modulasjonsfrekvens endres

I noen få tilfeller er det behov for å måtte endre modulasjonsfrekvens. Endring på plassering og vinkling skal være testet først

Er det behov for å justere fokus?

- ☐ Hvis gulvet ikke har stabil oransje farge uten flimrer og svarte felt, kan det være nødvendig å justere fokus ved å endre **modulasjonsfrekvensen**.
- ☐ Ulike frekvenser gjør det også mulig å bruke flere RoomMate-enheter i samme rom.
- ☐ Justere modulasjonsfrekvens i Velferdsportalen.

1. Gå inn på sensoren
2. Trykk på «rediger» i feltet konfigurasjon
3. Endre modulasjonsfrekvensen
4. Er det flere sensorer i samme rom må de alle ha ulike modulasjonsfrekvenser
5. Ved usikkerhet kan Careium kontakte Sensio sin support.
6. Careium informerer bydelen om hvilken modulasjonsfrekvens som er valgt, slik at riktig verdi kan settes når sensoren registreres i Velferdsportalen etter installasjon

The screenshot shows the 'RoomMate-Soverom-Testveien3b' configuration page. The 'Konfigurasjon' tab is active. On the left, the 'Egenskaper' (Properties) section lists details like Type (Tilsynssensor), Modell (Hardware 2), and Plassering (Testveien3b). The main configuration area on the right shows three dropdown menus: 'Modulasjonsfrekvens' (15 MHz (standard)), 'Oppløsning' (640 x 480), and 'Indikasjon på digitalt tilsyn' (Nei (Standard)). Below these are 'Lagre' (Save) and 'Avbryt' (Cancel) buttons. At the bottom, a 'Konfigurasjon' summary section shows the current settings. A red box highlights the 'Modulasjonsfrekvens' dropdown, and a green arrow points from the 'Rediger' (Edit) button in the summary section to it.

Installasjon av RoomMate

Ansvarlig utførende: Careium

Dette trenger du:

Verktøy:

- ☐ Gardintrapp
- ☐ Drill og slagdrill
- ☐ Bor til treverk og mur
- ☐ Skrutrekker med passende bits
- ☐ 10 mm fastnøkkel
- ☐ 4 mm unbrakonøkkel

Ekstrautstyr (bør ha liggende i bilen):

- ☐ Sensor
- ☐ Ruter

Skruer:

- ☐ 4 mm sølvskruer og plugger for gips, tre og mur
- ☐ 3–4 mm skruer for å feste strømtilkoblingen

Installasjon av RoomMate

Ansvarlig utførende: Careium

Start installasjon

- Velg riktig rotasjon for veggfestet



A

Med klokken: når hjørnet er nærmest høyre side

B

Mot klokken: når hjørnet er nærmest venstre side

Installasjon av RoomMate

Ansvarlig utførende: Careium

Fest sensor

Gipsvegg

1. Bruk gipsanker
2. Skru forsiktig – unngå overstramming!

Betongvegg

1. Bor et 5 cm dypt hull med slagdrill
2. Sett inn pluggene

Installer RoomMate og kontroller strømtilkobling:



1. Fest sensoren på braketten ved å bruke en av «inngangene» bak. Bruk inngangen som er nærmest veggen



2. Koble sensoren på braketten slik at den er vanskelig for beboer å få tak i.



3. Sjekk at sensoren har strøm, det skal lyse et lys på fronten av sensoren, på det sorte feltet. Det kan ta opptil et minutt.



4. Vinkle sensor for gunstig posisjon. Sjekk tilsyn i portalen og stram skruer godt slik at sensor ikke siger (minimum 7 Nm)


5. Legg kablene i kabelkanal

Installasjon av 4G-ruter og strømforsyning

Ansvarlig utførende: Careium

Komponentliste til Careium (side 1 av 2)

Sensio leverer følgende komponenter

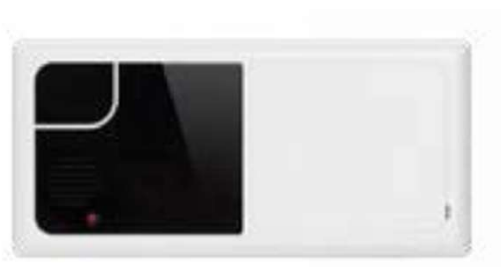

Figur 1: RoomMate



Figur 2: TRB140 (Teltonika 4G ruter)



Figur 3: DC Jack overgang:
2.5 mm til 2.1 mm



Figur 4: 2.1 mm til Molex plugg adapter



Figur 5: 2.5 mm DC splitter



Figur 6: RoomMate strømforsyning

Installasjon av 4G-ruter og strømforsyning

Ansvarlig utførende: Careium

Komponentliste til Careium (side 2 av 2)



Figur 7: Veggfeste til 4G - ruter



Figur 8: Antenne til 4G - ruter



Figur 9: 0.50 m Cat6 Ethernet kabel



Klistremerke som plasseres over stikk etter installasjon


Sensio leverer ikke følgende komponenter



Figur 10: Kabelkanal



Figur 11: Strips

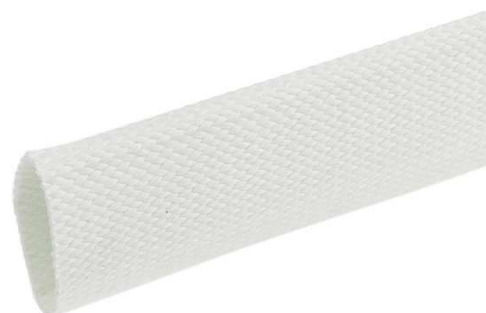

Figur 12: Kabelstrømpe


Installasjon av 4G-ruter og strømforsyning

Ansvarlig utførende: Careium

Koblingsskjema

4G ruter monteres minst 10 cm over RoomMate, slik som i koblingsskjema A

Borr hull i kabelkanal bak RoomMate for å dra kabler gjennom

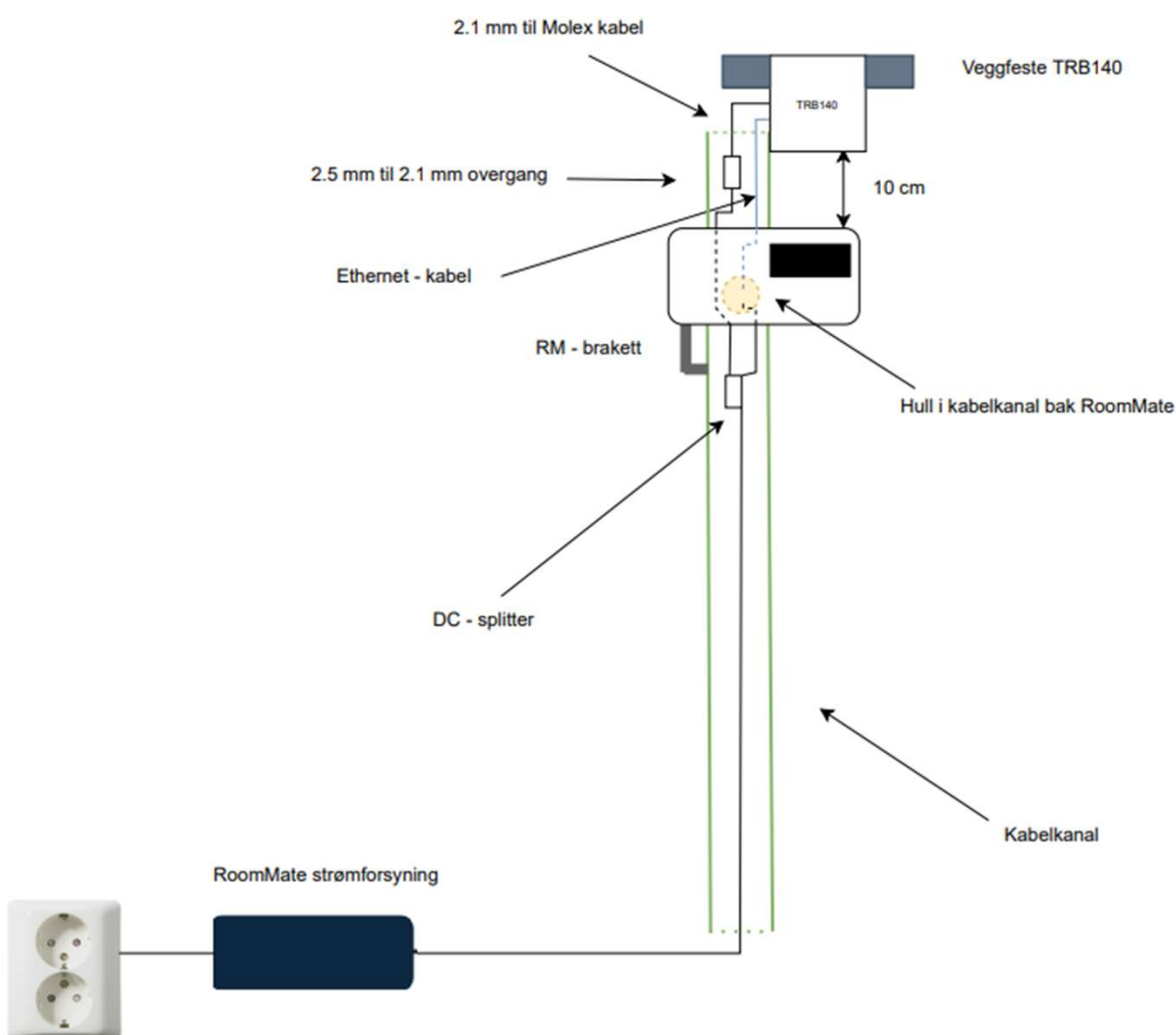


Figur 12: Koblingsskjema A

Installasjon av 4G-ruter og strømforsyning

Ansvarlig utførende: Careium


Om 4G – dekning ikke er tilstrekkelig i koblingsskjema A, eller om koblingsskjema A av andre årsaker ikke fungerer i boligen, så bruk koblingsskjema B. Sett 4G – ruter i hjørnet i rommet, minst 10 cm vekk fra RoomMate. Den eneste forskjellen mellom koblingsskjema A og B er plassering av 4G – ruter og bruk av kabelstrømpe.

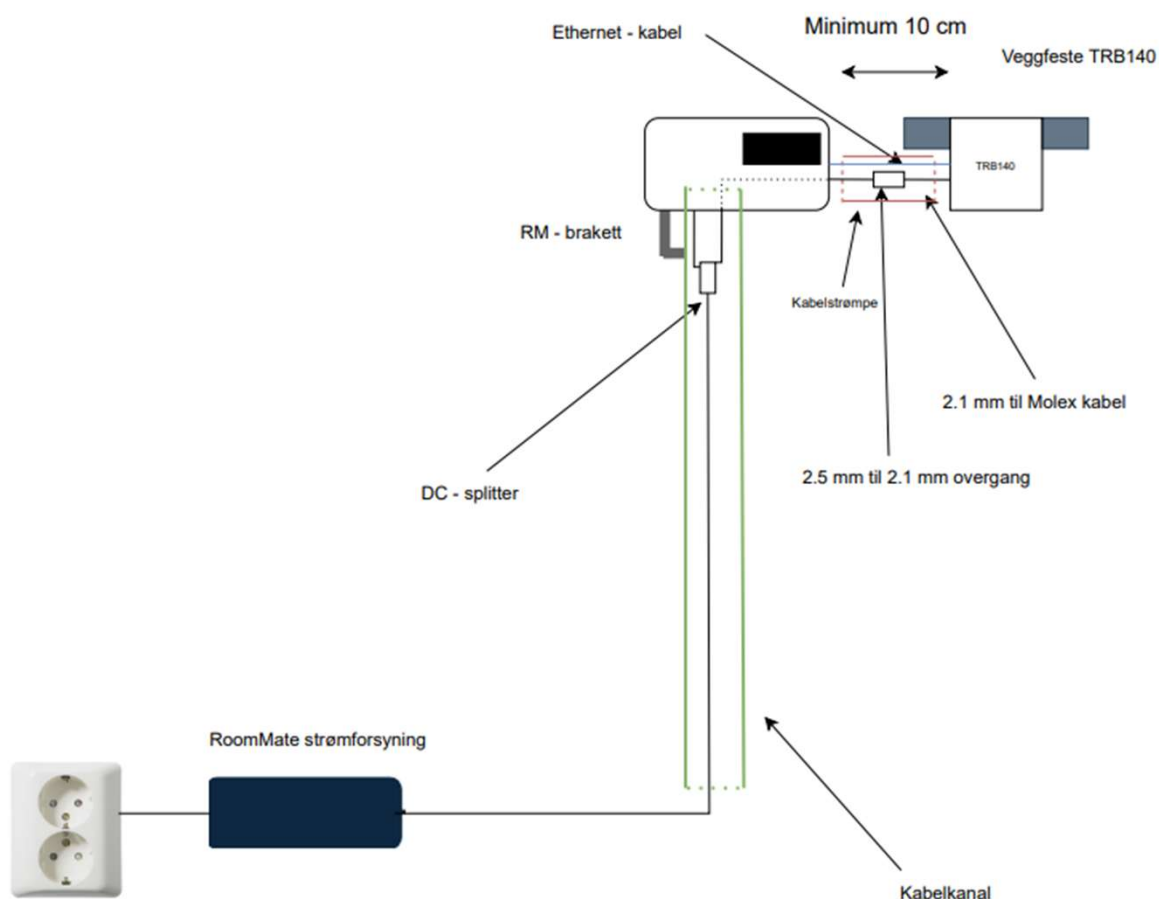

Figur 13: Koblingsskjema B

Installasjon av 4G-ruter og strømforsyning

Ansvarlig utførende: Careium

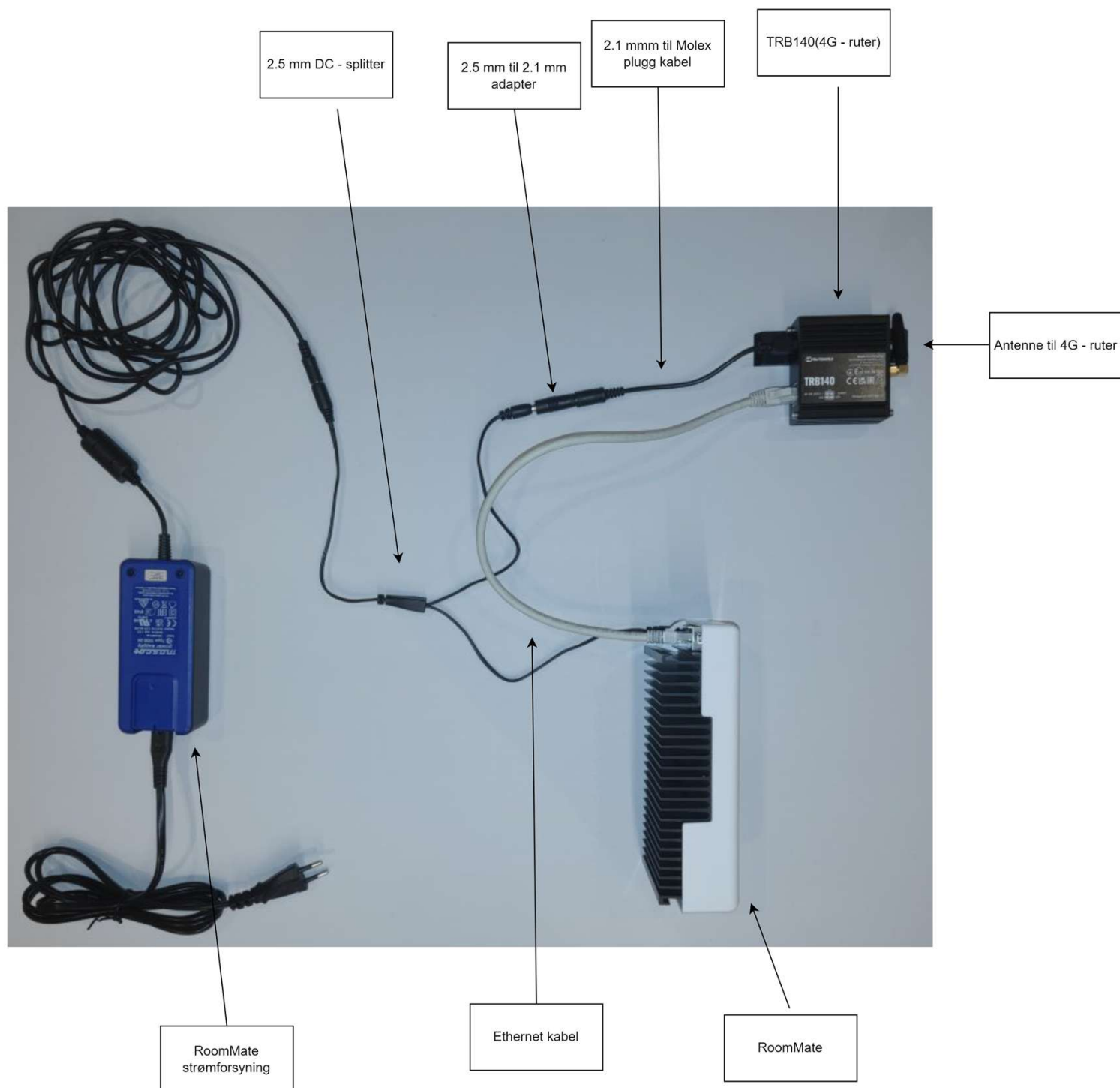

Installasjon av 4G-ruter og strømforsyning

Ansvarlig utførende: Careium

Fremgangsmåte (side 1 av 2)

1. Koble til TRB140 til 230 V via RoomMate strømforsyning, 2.5 mm DC – splitter, 2.5 – 2.1 mm adapter og 2.1 mm til Molex overgang, slik som i koblingsskjema. Sett TRB140 på stativ der den skal installeres og koble til antennen til 4G - ruter. Dette er for å sjekke at mobildekningen er god nok. Hvis det ikke er en stikkontakt i nærheten, dvs. 4m unna, avklar med bydelen om stikkontakt er noe pårørende skal dekke.
2. Logg inn på Teltonika RMS <https://account.rms.teltonika-networks.com/>. Dette er et administrasjonssystem for 4G – ruterne. Du vil få opp et panel som viser ruterne i Oslo HEL prosjektet.

Status

Online1

Device model

TRB1401

Device firmware

TRB1_R_00.0715.21

Actions

Filter

Search table...

Default

Showing 1 of 1 items

Page settings

☐	Status	Actions	Name	Model	Company name	Tags	Serial	MAC	Created at
☐			Oslo HEL Test	TRB140	#144587 Oslo Helseetaten	-	6000459449	4E:9B:9F:A5:87:38	2025-08-13 13:52:25

3. Trykk på informasjonsikonet under “Actions” i samme rad som ruterne du installerer

☐ Status	Actions	Name
☐ ●	ⓘ	Oslo HEL Test

4. Sjekk at det står “Online” til venstre for bildet av ruter. Om det ikke står «Online», sjekk fysisk at det lyser grønt ved «power» LED i ruter og sørg for at kablene er riktig koblet til. Det kan ta opptil 10 minutter fra man har koblet i strøm til ruterne får «Online» status i RMS.


TRB140 Online 1		Serial 6005206162 ⌵ MAC Address 4E:D9:A6:6C:AF:29 ⌵ IMEI 866967070103455 ⌵ Firmware TRB1_R_00.0715.2 ⌵ Management service Active Monitoring templates 2 / 6	Mobile status Ethernet ports Connection type IP Address 10.199.242.66/32	Device uptime 1h 17min 44s CPU usage 5.00 % RAM usage 122.56 / 165 MB Flash usage 0.72 / 86 MB Temperature 45 °C Modem Quectel EC25-EU
--	--	--	---	---

Installasjon av 4G-ruter og strømforsyning


Ansvarlig utførende: Careium

Fremgangsmåte (side 2 av 2)

5. Sjekk RSSI nivå ved å holde datamusen over ikonet til høyre for «Mobile Status». RSSI nivå skal være mellom -30 dBm og -75 dBm. **Sjekk at antennen er skrudd fast skikkelig på ruter.**

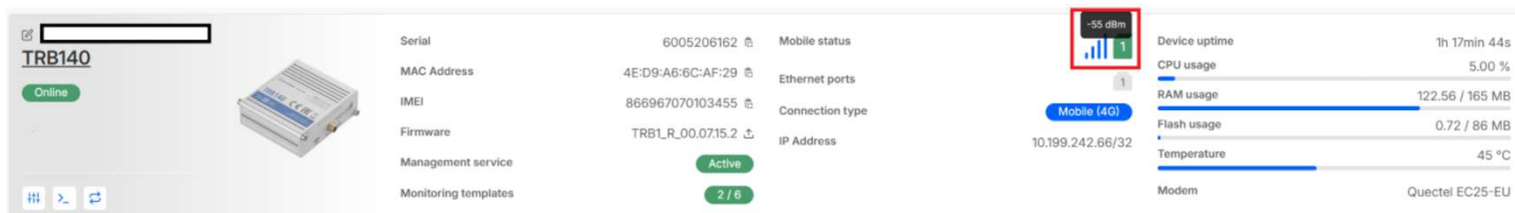

6. Trykk på redigeringsikonet ved siden av navnet på ruter.

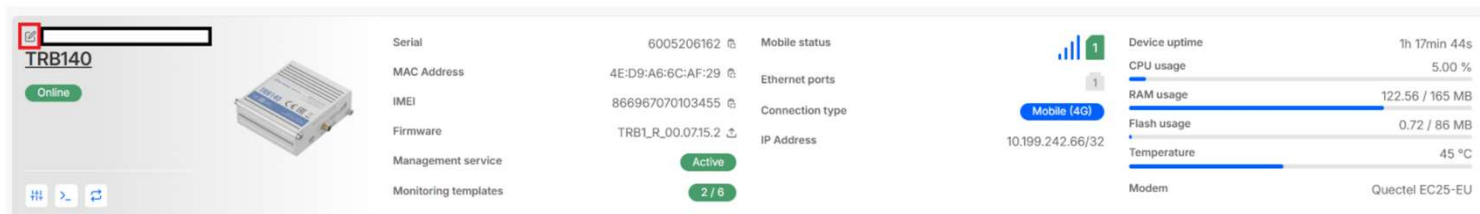

7. Endre navnet til RoomMatens serienummer og adresse, og endre beskrivelse til rom der ruter er installert. Se bilde under for et eksempel.

Edit device information — X

Device name
RM 25190 - Storgata 5

Device description
Stue 5000

Device tags
1 selected

Update

Trykk “Update”.

8. Følg koblingsskjema og koble til RoomMate.

9. Verifiser at RoomMate har kontakt i Velferdsportalen, se neste kapittel.

Kontroll av plassering - RoomMate

Ansvarlig utførende: Careium

Careium går gjennom sjekklisten ved plassering etter en sensor er montert på vegg:

- Gulvet har en stabil oransje farge, uten flimmer eller svarte felt.
- Bildet dekker seng, stol, baderomsdør og inngang, eller det som er mulig i forhold til rommet.
- Få blindsoner.
- Lite tak og vegger synlige i bildet.
- Ingen vinduer eller gardiner i bildet.



✓ Plassering er kontrollert og godkjent.

Når plasseringen av sensoren er bekreftet som korrekt av Careium, skal sensoren fjernes fra Careiums testlokasjon i Velferdsportalen

Stikk - klistremerke

Ansvarlig utførende: Careium

- Når sensor er plassert og montert og alt er klart ;
- Fest klistremerke over stikkontakt



Sluttdokumentasjon

Ansvarlig utførende: Careium

Dokumentasjon

Careium dokumenterer i installasjonsarket for hvert rom:

- Serienummer på ruter
- Serienummer på RoomMate
- Hvilken type rom den er knyttet mot
- Bilde av montert sensor på vegg, unngå personlige bilder
- Eventuelle avvik i forhold til møbler plassert «feil» (lampe i veien etc.). Installasjonsarket sendes så inn til Careium

Dokumentasjon sendes til Sensio via eget skjema. Lenke til installasjonsarket finner Careium i ordren fra Sensio.

Oppsett av markeringer og varsler

Ansvarlig utførende: Bydel

Kan gjøres tilbake på kontoret

Du trenger:



Laptop

Fremgangsmåte (side 1 av 2)

1. Logg inn i velferdsportalen (heltoslo.sensio.care)
2. Gå til boenhetens informasjonsside
3. Trykk «Legg til utstyr» og velg «Enhet»
4. Fyll inn informasjon
 - Type: Tilsynssensor (RoomMate365)
 - Kontroller plassering (dette skal være boenheten hvor RoomMaten er montert)
 - Styringsprosjekt: La stå
 - Enhetsnavn: RoomMate-**Leilighetsnavn**
 - NB! Hvis det er flere RoomMate i samme leilighet bør navnet indikere hvilket rom eller nummer sensoren har.
 - Serienummer: Finner du på undersiden av sensoren
5. Trykk «Lagre»

Legg til enhet

Type *

Tilsynssensor (RoomMate365)

Plassering

Leil. DEMO

Styringsprosjekt *

Digitalt tilsyn (Digitalt tilsyn)

Enhetsnavn *

RoomMate-DEMO

Navnet på enheten som vises i brukergrensesnittene

Tilleggsinformasjon

Serienummer *

123456

Lagre

Avbryt

Oppsett av markeringer og varsler

Ansvarlig utførende: Bydel

Kan gjøres tilbake på kontoret

Du trenger:



Laptop

Fremgangsmåte (side 2 av 2)

6. Hvis bydel har fått beskjed av Careium at modulasjonsfrekvens må endres. Gjøres dette nå. Se instruksjer på side19
7. På «Rommarkerings-siden» til sensoren: Rekalibrer sensor (husk at rommet må være tomt for mennesker!).
8. Gå gjennom sjekklisten i alle rom det er montert en sensor:
 - ☐ Gulvet har en stabil oransje farge, uten flimmer eller svarte felt.
 - ☐ Bildet dekker seng, stol, baderomsdør og inngang, eller det som er mulig i forhold til rommet.
 - ☐ Få blindsoner.
 - ☐ Lite tak og vegger synlige i bildet.
 - ☐ Ingen vinduer eller gardiner i bildet.
9. Rommet tegnes opp med de markeringene det er behov for

Besøkskort

Ansvarlig utførende: Bydel

- Besøkskort henges opp når sensoren er ferdig montert.
- Det følger med en krok som festes på vegg.
- Sensoren avstilles når reflekssiden er mot sensor og besøkskortet er markert.
- Sensoren må se rett på kortet:



Demonteringsveileder

RoomMate


Viktig: Denne delen av veiledningen gjelder kun ved demontering av sensorer. Ikke ved bytte av sensorer

Bydel trenger:



**Laptop /
pc på
kontoret**

Careium trenger:

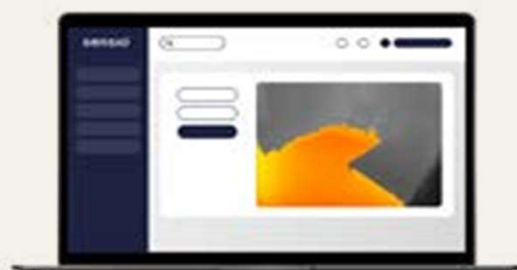

Laptop


- ☐ Skrutrekker med passende bitz
- ☐ Gardintrapp
- ☐ Drill

Slette sensorer fra Velferdsportalen


Ansvarlig utførende: Bydel

Første steget i en demontering/fjerning av sensor er å slette sensoren fra Velferdsportalen. Dette kan gjøres fra kontoret i forkant.

- 1. Logg inn i Velferdsportalen (www.heltoslo.sensio.no)
- 2. Finn boenheten sensoren du ønsker å demontere befinner seg på. Trykk inn på boenheten
- 3. Under utstyrsoversikt: velg sensor du ønsker å fjerne

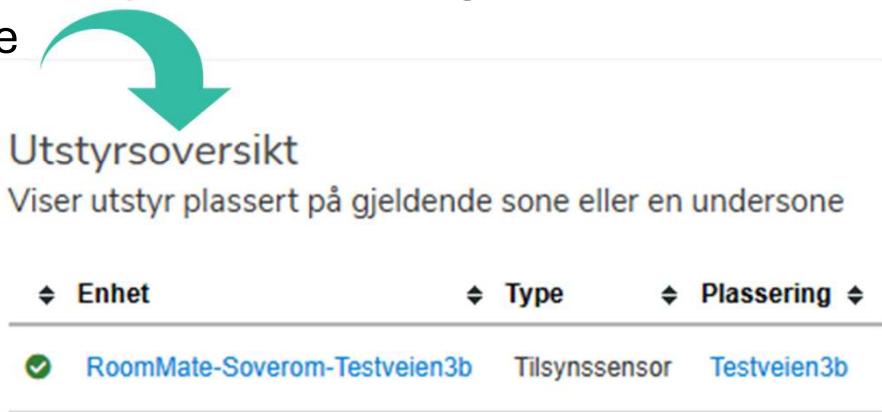

- 4. Klikk på sensoren
- 4. Inne på sensoren sin side velger du hamburgermeny «Slett Enhet»

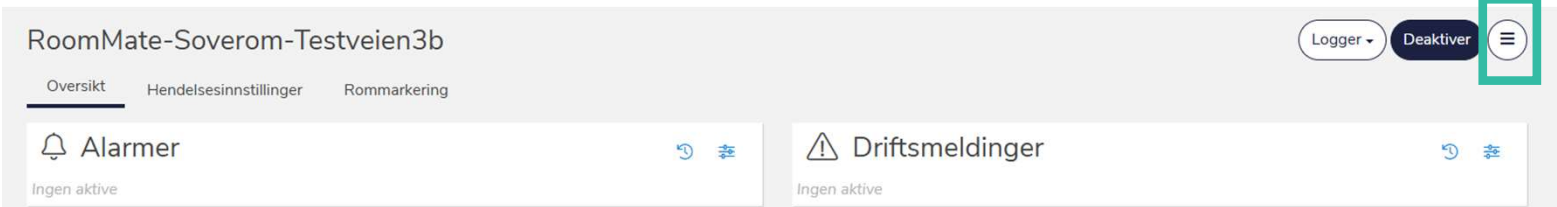

Lysbilde 30

PJ1

Oslo: Vi trenger fortsatt et kapitel som beskriver demontering og klargjøring av enheter etter demontering.
Hvem gjør hva når?

Patricia Sofia Jacobsen Jardim; 2026-01-14T12:03:59.967

Demontering og klargjøring av sensorer

Ansvarlig utførende: Careium

Bydels representant er tilstede under demonteringen med mindre det er avtalt at pårørende er tilstede

1. Bydelsrepresentant gir Careium beskjed om hvilke sensor som skal demonteres
2. Careium demonterer RoomMate, brakett og ruter.

NB: Careium er ikke ansvarlig for å tette skruehull eller fikse merker som skyldes den gamle sensoren

3. Careium sender inn demonteringsark til Sensio med serienummer på sensor og ruter. Lenke tildemonteringsarket finner Careium i ordren fra Sensio.

4. Ved demontering skal ruterens settes som «ledig» fra administrasjonssystemet til 4G rutere (se instruks neste side)

5. Careium tar med seg det demonterte utstyret, pakker fint ned med alle deler, og Sensio henter utstyret for resetting

6. Sensio resetter sensorene etter de er mottatt, slik at de er klar til å leies ut på nytt

Viktig: Bydelene skal ikke holde et eget lager på sensorer de ikke bruker.



Sette 4G-ruter til «ledig»

Ansvarlig utførende: Careium

1. Logg inn på Teltonika RMS <https://account.rms.teltonika-networks.com/>. Og søk opp ruter du skal demontere.

Status Online 1	Device model TRB140 1	Device firmware TRB1_R_00.0715.2 1
---------------------------	---------------------------------	--

Actions Filter Search table... Default Showing 1 of 1 items Page settings

Status	Actions	Name	Model	Company name	Tags	Serial	MAC	Created at
☐		Oslo HEL Test	TRB140	#144587 Oslo Helsestaten		6000459449	4E:9B:9F:A5:87:38	2025-08-13 13:52:25

2. Trykk på informasjonsikonet under “Actions” i samme rad som ruter du skal demontere

Status	Actions	Name
☐		Oslo HEL Test

3. Trykk på redigeringsikonet ved siden av navnet på ruter.

TRB140
Online

Serial 6005206162
MAC Address 4E:D9:A6:6C:AF:29
IMEI 866967070103455
Firmware TRB1_R_00.0715.2
Management service Active
Monitoring templates 2 / 6

Mobile status
Ethernet ports
Connection type
IP Address 10.199.242.66/32

Device uptime 1h 17min 44s
CPU usage 5.00 %
RAM usage 122.56 / 165 MB
Flash usage 0.72 / 86 MB
Temperature 45 °C
Modem Quectel EC25-EU

4. Endre navnet til "Ledig" og ta bort evt beskrivelser som er lagt inn. Se bilde under for et eksempel.

Edit device information

Device name
LEDIG

Device description

Device tags
1 selected

Update