

Stasjonær trygghetsalarm

Informasjonsbrosjyre for bydeler, tjenestemottakere og pårørende

Hvordan fungerer trygghetsalarmen?

1. Alarmknapp for å tilkalle hjelp (det ringes til Careiums responscenter)
2. Farge på sirkel viser status:
 - a) Rødt= alarm er aktivert
 - b) Lilla = trygghetsalarmen er i innlæringsmodus
 - c) Blå = Normal modus
3. Avbryter en alarm hvis den trykkes på innen 10 sekunder. Lyden "Tilkalling av hjelp ble avbrutt" blir spilt av to ganger



Utstyr som kan tilknyttes trygghetsalarmen



Røykvarsler



Alarmknapp



Universalinngang
til tilleggsutstyr



Trekkesnor



Hjelpknapp



For deg som pårørende

Når du er på besøk til noen som har en trygghetsalarm installert er det viktig at du ikke drar ut stikkontakten.

Når alarm utløses

Varslinger fra trygghetsalarmer blir sendt til responscenter. Håndtering av varslinger blir loggført og journalført.

